



People.Health.Care.

Rosidal® 1C **NEU**

Kompression neu gedacht,
schnell gemacht.

gerlin

effektiv

zeitsparend

einfach

Rosidal® 1C **NEU**

Die 3-in-1 Kurzzugbinde mit Hautkontakt-, Polsterschicht- und Kompressionslage.



Effektivität erleben:

- zuverlässige, kräftige Kompression: hoher Arbeits-, niedriger Ruhedruck (von bis zu 40–60 mmHg)
- der therapeutisch relevante Druck wird mehrere Tage aufrechterhalten*
- kann bis zu sieben Tage, Tag und Nacht, getragen werden*
- gute Anpassungsfähigkeit und einfaches Anlegen durch Querelastizität

Mit Effizienz punkten:

- **einfaches** und sicheres Anlegen durch innovatives Safe-Loc-System
- **zeitsparende** und schnelle Anwendung dank 3-in-1

Komfort spüren:

- textile Frottee-Struktur
- schlankes Design ermöglicht das Tragen in den meisten Schuhtypen im Vergleich zu Mehrkomponentensystemen

Quelle

* Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen der Beobachtungsstudie NCT06728137 (www.clinicaltrials.gov)

Rosidal® 1C **NEU**

Maximaler Nutzen mit nur einer Kurzzugbinde.

Verwendungszweck:

Zur Kompression, zur Fixierung von Verbänden, zum Stützen und Entlasten und zur Ruhigstellung von Körperteilen.

Indikationen:

- Varikose
- Veneninsuffizienz
- Thrombophlebitis
- Phlebothrombose
- postthrombotisches Syndrom
- Stadium I bis III b chronische Veneninsuffizienz nach Widmer
- venöse und gemischte Ulzera
- Ödeme (Phleboödem, posttraumatisch, postoperativ, während der Schwangerschaft)
- nach Sklerotherapie und Venenoperation
- Prellungen, Verstauchungen, Sehnenverletzungen und Gelenkluxationen

Vertrauen Sie Ihrer Zugkraft mit dem Safe-Loc-System:
100% ziehen, anlegen, fertig.

Das Safe-Loc-System macht die Anwendung von Rosidal 1C sicher, schnell und einfach.




- Rosidal 1C wird unter vollem Zug – also bei **maximaler Dehnung** – angelegt



- eine Überdehnung der Binde und somit ein zu starker Kompressionsdruck werden verringert – das bietet hohe **Anwenderfreundlichkeit und Therapiesicherheit**
- der Blutfluss in den venösen Blutgefäßen kann verbessert werden – und fördert so den **Therapieerfolg**



In zwei Breiten
erhältlich:
8 cm & 10 cm

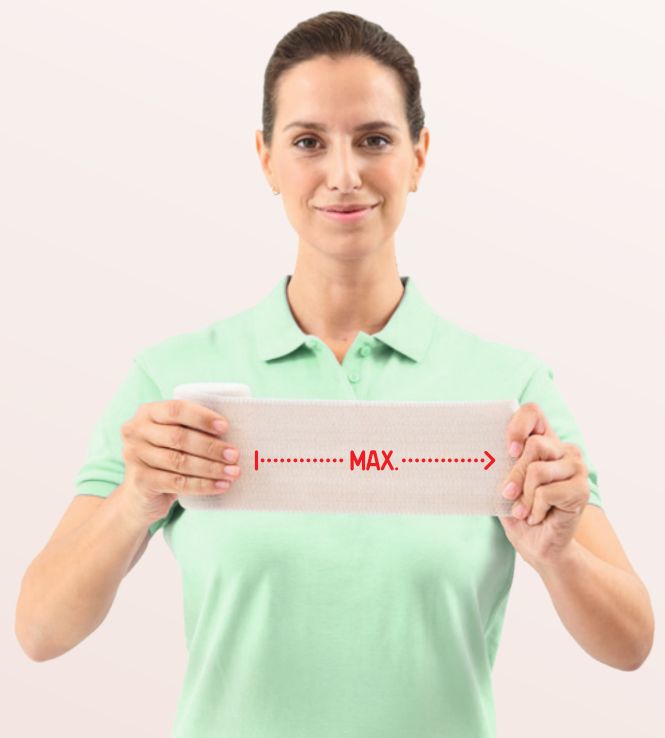

Rosidal® 1C **NEU**

Die 3-in-1 Kurzzugbinde.

Hautkontaktlage

Polsterschichtlage

Kompressionslage



Rosidal® 1C

Abmessungen (cm x m gedehnte Länge)*	REF	Pharma- code	MiGeL	Anzahl	VE (Stück)
8 x 6	162 154	113 833 8	17.30.01.02.1	1 Rolle	1/32
8 x 6	162 155	113 833 9	17.30.01.02.1	6 Rollen	6/24
10 x 6	162 156	113 834 0	17.30.01.03.1	1 Rolle	1/60
10 x 6	162 157	113 834 1	17.30.01.03.1	6 Rollen	6/24

* Die Bindenbreite sollte dem Durchmesser des zu verbindenden Körperteils entsprechen.

Material

Polyamid 48%, Baumwolle 42%, Polyester 6%, Elastan 4%



Enthält kein Latex

Naturkautschuklatex ist kein vorgesehener Bestandteil bei der Herstellung der oben genannten Produkte oder deren Verpackung. Eine mögliche Kontamination mit Spuren von Latex aus der Produktion oder der Umwelt können wir nicht völlig ausschliessen.

