

ReadyWrap®

Die einfache Selbstversorgung für die Kompressionstherapie.



Support for Life*

ReadyWrap® ist ein adaptives Kompressionssystem für Patienten mit venösen oder lymphatischen Krankheiten in Armen und Beinen.



Mit ReadyWrap® kann eine klinisch effektive Kompression erreicht werden.¹ Es bietet den Patienten die langfristige Unterstützung, die sie im Umgang mit ihrer Erkrankung benötigen.

Einfache Anwendung, Applikation und Nachjustierung^{3,4} – auch mit arthritischen Händen³

Trägt wenig auf, ermöglicht Patienten, normale Schuhe zu tragen²

Ermöglicht den Patienten die Selbstversorgung¹¹

Langfristige
von Pati
Ready



Verbesserte Adhärenz –
gute Patientenverträglichkeit⁴

Kosteneffektiv –
Alternative zu Binden dank
einfacher Selbstversorgung¹¹

Spart Zeit – reduziert Arzt-
und Krankenhausbesuche¹¹

Unterstützung
enten mit
Wrap®

Was macht ReadyWrap® so besonders?

Das adaptive Kompressionssystem ReadyWrap wurde entwickelt, um die Kompressionstherapie für Patienten mit venösen oder lymphatischen Krankheiten zu vereinfachen.

ReadyWrap® ist leicht anzuwenden für Patienten

Einfache Handhabung³ durch den Farbcode der VELCRO® Klettverschlüsse

- kurze, vorne verschließbare Bänder erleichtern die Applikation und Nachjustierung^{3,4}
- überlappende Bänder verhindern unnötigen Druckverlust und optimieren die Produktanwendung¹
- trägt wenig auf – ermöglicht es den Patienten, normale Schuhe zu tragen²
- alle Produkte erhältlich in Schwarz und Beige 



Die Wirksamkeit von ReadyWrap® ist klinisch bewiesen

Kurzzugeigenschaften¹³ – therapeutisch wirksamer Arbeitsdruck und gut verträglicher niedriger Ruhedruck

- positive Ergebnisse bei Ulcus cruris^{3,4,5} und Patienten mit Lymphödemen⁴
- effektive Behandlung bei wiederauftretenden Schwellungen (Ödemen) und Ulzerationen⁵
- ausgezeichneter Static Stiffness Index (SSI) zwischen 16 und 23, ähnlich wie bei unelastischen Binden¹³
- Bänder mit 50%iger Überlappung verhindern Lücken, können an die Körperform angepasst werden, falls sich diese im Lauf der Therapie verändert, und dienen der Reduktion und Kontrolle von Ödemen^{4,5}



ReadyWrap® ist kostengünstig

ReadyWrap® kann Kosten einsparen durch:⁷⁻¹¹

- Zeitersparnis dank der schnelleren und einfacheren Anwendung des Produkts im Vergleich zu Kompressionsbinden
- geringere Verwendung von Bindenmaterialien – ReadyWrap kann gewaschen und bis zu sechs Monate wiederverwendet werden
- reduziert Arzt- und Krankenhausbesuche durch die einfache Selbstversorgung
- reduzierter Pflegeaufwand, da das Produkt einfach durch den Patienten oder dessen Betreuer angebracht werden kann





ReadyWrap® erleichtert den Alltag.

ReadyWrap® basiert auf einem ganzheitlichen Therapieansatz und bietet Patienten und medizinischen Fachkräften Unterstützung in jeder Phase der Kompressionstherapie. Unser Schwerpunkt liegt auf einer Kombination aus erfolgreicher klinischer Behandlung sowie Zeit- und Kostenersparnis. L&R bietet Patienten und medizinischen Fachkräften

Support for Life 






„ReadyWrap® ist für die Patienten so einfach anzuwenden, dass es dazu beigetragen hat, die Anzahl der wöchentlichen Behandlungstermine in unserer Klinik **von drei auf zwei zu reduzieren** und die **Behandlungszeiten im Vergleich zu einer Therapie mit Kurzzugbinden um die Hälfte zu verkürzen**. Meine Patienten erhalten ihre Unabhängigkeit zurück und wir haben die Kosten im Griff.“


Ellen,
Haut- und Ödemtherapeutin

„Im Rahmen der Kompressionstherapie muss ich meinen Patienten oft mehrmals pro Woche besuchen, was unwirtschaftlich ist. Durch ReadyWrap® konnten wir die **Zeit für die Pflege des Ödems reduzieren** und **zudem die Schwellung so stark reduzieren**, dass mein Patient wieder seine Stiefel tragen und Motorrad fahren kann.“

Robert,
Krankenpfleger

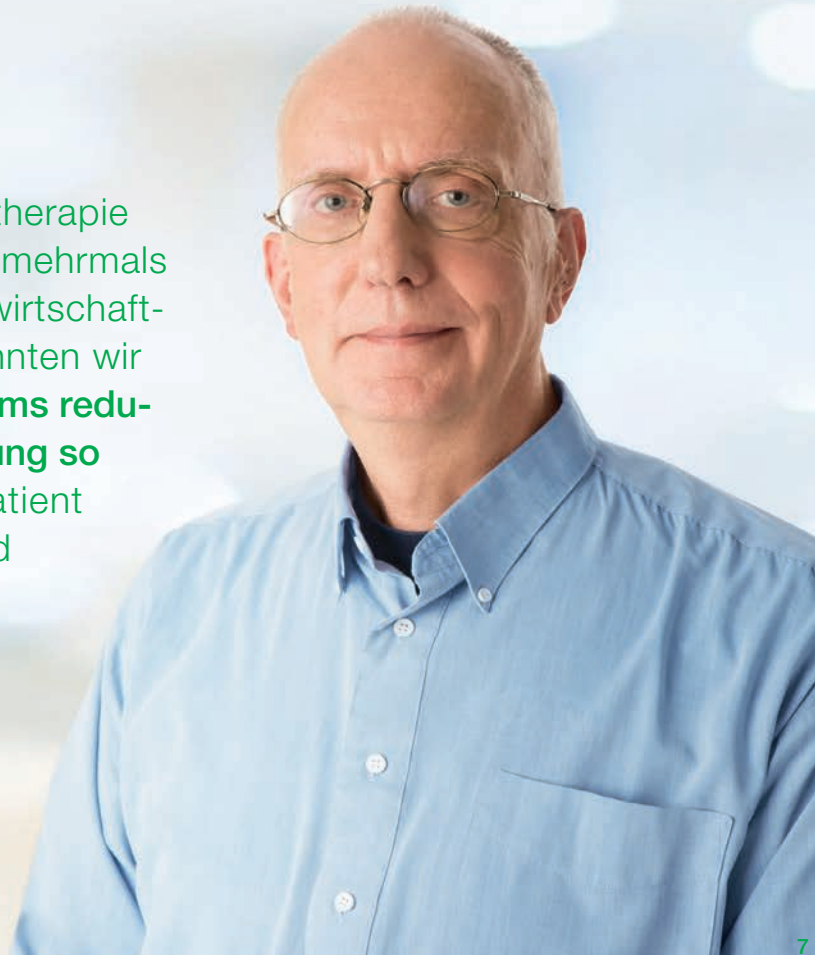

- 1 vorgeformte gebogene Bänder passen sich an den Körper an und bieten Komfort und Unterstützung
- 2 durch die innovative und bequeme Fixierung auf der Rückseite³ wird die Dehnung im Bereich der Wade vermindert und der Verband behält seine Form
- 3 farbcodierte Klettverschlüsse erleichtern das Anlegen⁴

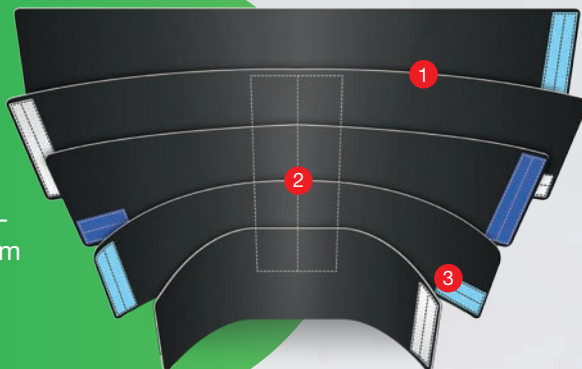

Hinweis: Jeder ReadyWrap (außer ReadyWrap Zehen) wird mit einem Unterstrumpf geliefert. Dieser Unterstrumpf wird unter dem ReadyWrap getragen.

ReadyWrap®

Kompressionssystem für die untere Extremität.

Farbcodierte
kurze Bänder



ReadyWrap® Zehen

- das innovative Design erlaubt eine individuelle Anpassung an den Zehenumfang
- ermöglicht in Kombination mit dem ReadyWrap für den Fuß eine Abdeckung des ganzen Fußes
- die unterschiedliche Ausführung für den rechten und linken Fuß bietet eine bessere Passform



ReadyWrap® Fuß

- unterschiedliche Ausführung für den rechten und linken Fuß und Abnäher im Bereich des Innenknöchels verbessern die Passform
- leichtes Anziehen mit zwei Bändern – passt in die meisten Schuhe
- ReadyWrap Unterschenkel und Zehen sorgen für eine vollständige Überlappung

Die Anleitungen werden für eine bessere Visualisierung ohne Unterstrumpf dargestellt.

ReadyWrap®

Kompressionssystem für die untere Extremität.



ReadyWrap® Unterschenkel

- kann in Kombination mit Kompressionsstrümpfen für mehr Halt und Schutz getragen werden
- die Fixierung an der Rückseite reduziert die Dehnung und verbessert den Halt
- ReadyWrap Fuß und Knie sorgen für eine vollständige Überlappung



ReadyWrap® Oberschenkel


- Kurzzug-Eigenschaften mit niedrigem Ruhedruck und hohem Arbeitsdruck von der Kniescheibe bis zur Leiste
- mithilfe der oberen Bänder kann der ReadyWrap optimal an gerade und konische Oberschenkel angepasst werden
- ReadyWrap Knie und Oberschenkel sorgen für eine vollständige Überlappung



ReadyWrap® Knie

- einfach anzuwenden mit drei Bändern – bietet einen bequemen Sitz und reduziert mögliche Einschnürungen und Druckstellen
- ReadyWrap Unter- und Oberschenkel sorgen für eine vollständige Überlappung

ReadyWrap® Verlängerungsband

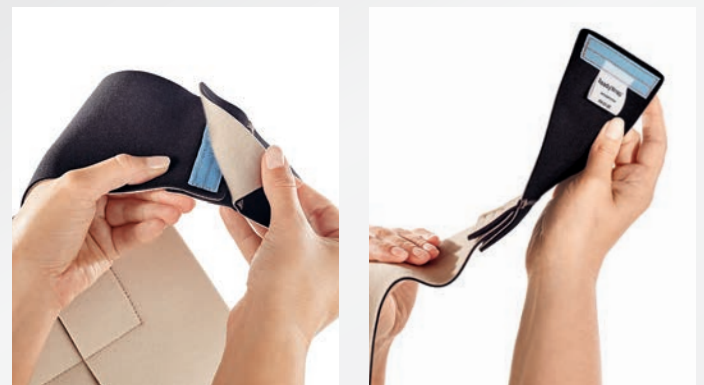


- verlängert das ReadyWrap Standard-Band um 10 cm
- die Y-förmige Lasche am Bandende ermöglicht eine sichere Fixierung
- kombinierbar mit ReadyWraps Unterschenkel, Knie und Oberschenkel

1 vorgeformte gebogene Bänder
passen sich an den Körper an und
bieten Komfort und Unterstützung

2 der Innenärmel sorgt für
die korrekte Passform

3 farbcodierte Klettverschlüsse
ermöglichen eine einfache
Anwendung

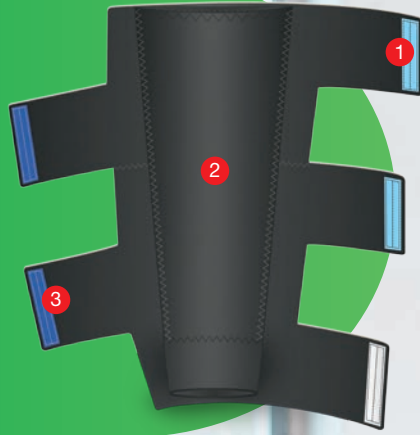

Kompressionssystem für die obere Extremität.



- # ReadyWrap® Handschuh

-



ReadyWrap®

Abmessen der unteren Extremität.

Grundlage einer erfolgreichen Behandlung ist die optimale Größe.

Nur ein perfekt sitzender ReadyWrap kann die bestmögliche therapeutische Wirkung erzielen. Daher ist es sehr wichtig, die richtige Größe Ihrer Körperteile zu bestimmen. Mithilfe unserer Größentabellen finden Sie die richtige Größe schnell und einfach. Größentabelle siehe www.Lohmann-Rauscher.com

- 1 Markieren Sie zunächst die Umfangsmesspunkte und messen Sie dann den Umfang am Bein von oben nach unten. Sobald der Umfang an den erforderlichen Messpunkten für den ReadyWrap gemessen wurde, bestimmen Sie die individuellen Längen zwischen den dargestellten Umfangsmesspunkten – IG-E', ID-B und IA-Y.

ReadyWrap®
Ermittlung der Bein-Maße.

Messung des Beines: Bitten Sie den Patienten, wenn möglich zu stehen.

Schreiben Sie Ihre Messergebnisse in das Feld ne

Umfangs-Messpunkte:		Längenmaße:	
cA	rund um den Zehenansatz	IA-Y	von der Ferse bis zum Zehenansatz
cY	über Rist und Ferse bei Dorsalflexion	ID-B	Länge von Messpunkt cB (2 cm über dem Malleolus lateral) bis Messpunkt cD (2 cm unter der Kniekehle)
cB	2 cm über dem Malleolus lateral	IG-E	Länge von Messpunkt cE' (5 cm über dem Knie) und Messpunkt cG (2 cm unter der Gluteal-Falte)
cC	am größten Umfang der Wade		
cD	2-3 cm unter der Kniekehle		
cE'	5 cm über dem Knie		
cG	2 cm unter der Gluteal-Falte		

Bitte senden Sie beide Seiten des ausgefüllten Formulars an unseren Kundendienst.
Entweder per Fax-Nr. 01/577 17 30 oder eingescannt per Mail unter Bestellung.L+R@at.LRmed.com.
Sollten Sie Fragen zum Formular oder zum Produkt haben, erreichen Sie uns telefonisch unter 01/577 17 30.

Bestellformular

Name des Arztes: _____

Patientenname: _____

Bestellnummer: _____

Name des Bandagisten: _____

Lieferadresse: _____

Messdatum: _____


Bestelldatum: _____



2

Prüfen Sie die Größe des ReadyWraps auf der Messtabelle und kreuzen Sie den Produktcode an.

Markieren und messen Sie das Bein wie folgt:

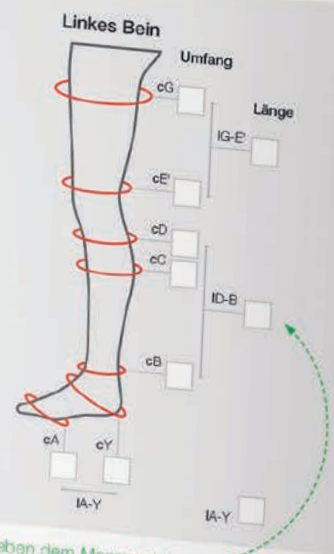

Anmerkung
c = Umfang, l = Länge
Alle Längenmessungen sollten senkrecht ausgeführt werden und der Körperkontur folgen.

Alle Maßangaben in Zentimetern.

Bitte kreuzen Sie den gewählten Verband an:

	Small	Medium	Large	Extra Large	Extra Extra Large
ReadyWrap® für den Oberschenkel					
(G-E') (2 Längen)	Leistenumfang (cG) 48-62 cm Umfang über Knie (cE') 38-48 cm	Leistenumfang (cG) 58-73 cm Umfang über Knie (cE') 45-58 cm	Leistenumfang (cG) 68-83 cm Umfang über Knie (cE') 52-68 cm	Leistenumfang (cG) 78-93 cm Umfang über Knie (cE') 59-78 cm	Leistenumfang (cG) 88-103 cm Umfang über Knie (cE') 66-98 cm
Beige bis 25 cm	☐ 104478	☐ 104474	☒ 104470	☐ 104482	☐ 104790
Schwarz bis 25 cm	☐ 104479	☐ 104475	☒ 104471	☐ 104483	☐ 104791
Beige bis 30 cm	☐ 104480	☐ 104476	☐ 104472	☐ 104484	☐ 104792
Schwarz bis 30 cm	☐ 104481	☐ 104477	☐ 104473	☐ 104485	☐ 104793
ReadyWrap® für das Knie					
(eine Länge - 20 cm)	Umfang über Knie (cE') 38-48 cm Umfang unter Knie (cC) 28-38 cm	Umfang über Knie (cE') 45-58 cm Umfang unter Knie (cC) 33-43 cm	Umfang über Knie (cE') 52-68 cm Umfang unter Knie (cC) 38-48 cm	Umfang über Knie (cE') 59-78 cm Umfang unter Knie (cC) 43-53 cm	Umfang über Knie (cE') 66-98 cm Umfang unter Knie (cC) 53-68 cm
Beige	☐ 104464	☐ 104462	☒ 104460	☐ 104466	☐ 104788
Schwarz	☐ 104465	☐ 104463	☐ 104461	☐ 104467	☐ 104789
ReadyWrap® für den Unterschenkel					
(D-B) (2 Längen)	Unterschenkelumfang (cC) 28-38 cm Knöchelumfang (cD) 18-23 cm	Unterschenkelumfang (cC) 33-43 cm Knöchelumfang (cD) 20-28 cm	Unterschenkelumfang (cC) 38-48 cm Knöchelumfang (cD) 25-33 cm	Unterschenkelumfang (cC) 43-53 cm Knöchelumfang (cD) 30-38 cm	Unterschenkelumfang (cC) 53-68 cm Knöchelumfang (cD) 35-43 cm
Beige bis 30 cm	☐ 104450	☐ 104446	☐ 104442	☐ 104454	☐ 104784
Schwarz bis 30 cm	☐ 104451	☐ 104447	☐ 104443	☐ 104455	☐ 104785
Beige bis 35 cm	☐ 104452	☐ 104448	☒ 104444	☐ 104456	☐ 104786
Schwarz bis 35 cm	☐ 104453	☐ 104449	☐ 104445	☐ 104457	☐ 104787
ReadyWrap® für den Fuß					
(Seite)	Fußlänge (A-Y) up to 21 cm Knöchelumfang (cD) 18-23 cm Umfang (cY) 28-33 cm	Fußlänge (A-Y) up to 23 cm Knöchelumfang (cD) 20-28 cm Umfang (cY) 30-38 cm	Fußlänge (A-Y) up to 25 cm Knöchelumfang (cD) 25-33 cm Umfang (cY) 35-43 cm	Fußlänge (A-Y) up to 29 cm Knöchelumfang (cD) 30-38 cm Umfang (cY) 40-48 cm	
Rechts Beige	☐ 104430	☐ 104434	☒ 104432	☐ 104438	
Rechts Schwarz	☐ 104437	☐ 104435	☐ 104433	☐ 104439	
Links Beige	☐ 104428	☐ 104426	☐ 104424	☐ 104430	
Links Schwarz	☐ 104429	☐ 104427	☐ 104425	☐ 104431	
ReadyWrap® für die Zehen					
(cA) (Seite)	Umfang (cA) 18,0-20,4 cm	Umfang (cA) 20,5-23,5 cm	Umfang (cA) 23,0-26,0 cm	Umfang (cA) 26,1-28,5 cm	Umfang (cA) 28,6-31,0 cm
Rechts Beige	☐ 104416	☒ 104414	☐ 104412	☐ 104418	☐ 104420
Rechts Schwarz	☐ 104417	☐ 104415	☐ 104413	☐ 104419	☐ 104421
Links Beige	☐ 104406	☐ 104404	☐ 104402	☐ 104408	☐ 104410
Links Schwarz	☐ 104407	☐ 104405	☐ 104403	☐ 104409	☐ 104411
ReadyWrap® Verlängerungsband					
	Einheitsgröße				
Beige	☐ 104740				
Schwarz	☐ 104741				

Bitte kreuzen Sie den jeweiligen Verband an und tragen Sie anschließend alle Daten in die Tabelle ein.

Verband (Rechtes Bein)	Länge/ Seite	Farbe	Größe	Anzahl	REF	Verband (Linkes Bein)	Länge/ Seite	Farbe	Größe	Anzahl	REF
Oberschenkel	☐ 25 cm ☒ 30 cm	☒ Beige ☐ Schwarz	Large	2	104472	Oberschenkel	☐ 25 cm ☐ 30 cm	☐ Beige ☐ Schwarz			
Knie		☒ Beige ☐ Schwarz	Large	2	104460	Knie		☐ Beige ☐ Schwarz			
Unterschenkel	☐ 30 cm ☒ 35 cm	☒ Beige ☐ Schwarz	Large	2	104444	Unterschenkel	☐ 30 cm ☐ 35 cm	☐ Beige ☐ Schwarz			
Fuß		☒ Beige ☐ Schwarz	Large	2	104432	Fuß		☐ Beige ☐ Schwarz			
Zeh		☒ Beige ☐ Schwarz	Medium	2	104414	Zeh		☐ Beige ☐ Schwarz			
Verlängerungs- band		☒ Beige ☐ Schwarz				Verlängerungs- band		☐ Beige ☐ Schwarz			

3

Bitte übernehmen Sie diese Angaben beim Ausfüllen des Bestellformulars, und achten Sie darauf, dass alle Kontaktdaten und REFs korrekt sind. In einigen Märkten haben Sie auch die Möglichkeit, ReadyWrap über das Online-Bestellportal zu beziehen.

- 1 Markieren Sie zunächst die Punkte an den Armen und messen Sie dann den Umfang. Sobald der Umfang an den erforderlichen Messpunkten für den ReadyWrap gemessen wurde, bestimmen Sie die individuellen Längen zwischen den dargestellten Umfangs-Messpunkten – IC-G und/oder IA-C.

ReadyWrap® Ermittlung der Arm-Maße.

Messung des Armes:

Führen Sie die Messung am locker aufliegenden Arm bei leicht gebeugtem Ellenbogen durch. Die Messpunkte entsprechen den folgenden anatomischen Orientierungspunkten:

Umfangs-Messpunkte:

- cA größter Umfang der Handfläche, direkt unter dem Daumengrundgelenk
- cC geringster Umfang des Handgelenks
- cE rund um das Ellenbogengelenk und die Ellenbeuge
- cG am Oberarm direkt unter der Achselhöhle

Längenmaße:


- IA-C die Länge zwischen Punkt cA (größter Umfang der Handfläche, direkt unter dem Daumengrundgelenk) und Punkt cC (geringster Umfang des Handgelenks)
- IC-G die Länge zwischen Punkt cC (geringster Umfang des Handgelenks) und Punkt cG (am Oberarm, direkt unter der Achselhöhle)

Anmerkung

c = Umfang, l = Länge

Alle Längenmessungen sollten der Körperkontur folgen.

Alle Maßangaben in Zentimetern.

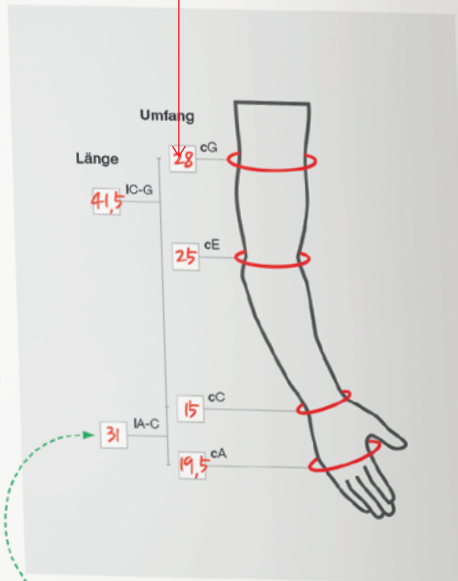

Schreiben Sie Ihre Messergebnisse in das Feld neben dem Messpunkt.

Bitte kreuzen Sie den gewählten ReadyWrap® Arm

Small	
ReadyWrap® Arm	
(IC-G) (3 Längen)	Achselumfang (cG) 22-29 cm Ellenbogenumfang (cE) 19-26 cm Handgelenksumfang (cC) 13,5-17 cm
Kurz ■ Beige bis 43 cm ■ Schwarz bis 43 cm	☐ 104514 ☒ 104515
Mittel ■ Beige bis 46 cm ■ Schwarz bis 46 cm	☐ 104516 ☐ 104517
Groß ■ Beige bis 49,5 cm ■ Schwarz bis 49,5 cm	☐ 104518 ☐ 104519

ReadyWrap® Handschuh

Länge (IA-C) bis 12,5 cm	
Handgelenksumfang (cC) 13,5-17 cm	Handflächenumfang (cA) 18-20 cm
Rechts ■ Beige Rechts ■ Schwarz	☐ 104498 ☐ 104499
Links ■ Beige Links ■ Schwarz	☐ 104490 ☒ 104491

Bitte senden Sie beide Seiten des ausgefüllten Formulars an unseren Kundendienst.
 Entweder per Fax-Nr. 01/577 17 30 oder eingescannt per Mail unter Bestellung.L+B@at.lbmed.com
 Sollten Sie Fragen zum Formular oder zum Produkt haben, erreichen Sie uns telefonisch unter 01/576 70-400

Bestellformular

Name des Arztes: _____ Tel.: _____
 Patientennamen: _____ SV-Nr.: _____
 Bestellnummer: _____
 Name des Bandagisten: _____
 Lieferadresse: _____
 Messdatum: ____/____/____
 Bestelldatum: ____/____/____

Stempel mit Datum und Unterschrift

Bitte kreuzen Sie den jeweiligen Verband an und tragen Sie die Farbe an

Verband (Arm)	Länge/Seite	Farbe
Arm	☒ 43 cm	☐ Beige
	☐ 46 cm	☒ Schwarz
	☐ 49 cm	
Handschuh	☐ Rechts	☐ Beige
	☒ Links	☒ Schwarz

Grundlage einer erfolgreichen Behandlung ist die richtige Größe.

Nur ein perfekt sitzendes ReadyWrap kann die bestmögliche therapeutische Wirkung erzielen. Daher ist es sehr wichtig, die richtige Größe Ihrer Körperteile zu bestimmen. Mithilfe unserer Größentabellen finden Sie die richtige Größe schnell und einfach. Größentabelle siehe www.Lohmann-Rauscher.com

2 Prüfen Sie die Größe des ReadyWraps auf der Messtabelle und kreuzen Sie den Produktcode an.

3 Bitte übernehmen Sie diese Angaben beim Ausfüllen des Bestellformulars, und achten Sie darauf, dass alle Kontaktdaten und REFs korrekt sind. In einigen Märkten haben Sie auch die Möglichkeit, ReadyWrap über das Online-Bestellportal zu beziehen.

Wählen Sie den Verband an:

Medium	Large	Extra Large
Achselumfang (cG) 26-36 cm Ellenbogenumfang (cE) 24-33 cm Handgelenkumfang (cC) 15,5-20 cm ☐ 104508 ☐ 104509 ☐ 104510 ☐ 104511 ☐ 104512 ☐ 104513	Achselumfang (cG) 31-43 cm Ellenbogenumfang (cE) 29-40 cm Handgelenkumfang (cC) 17,5-23 cm ☐ 104502 ☐ 104503 ☐ 104504 ☐ 104505 ☐ 104506 ☐ 104507	Achselumfang (cG) 36-50 cm Ellenbogenumfang (cE) 30-43 cm Handgelenkumfang (cC) 17,5-23 cm ☐ 104520 ☐ 104521 ☐ 104522 ☐ 104523 ☐ 104524 ☐ 104525
Länge (IA-C) bis 13,5 cm Handgelenkumfang (cC) 15,5-20 cm Handflächenumfang (cA) 20-22 cm ☐ 104496 ☐ 104497 ☐ 104488 ☐ 104489	Länge (IA-C) bis 14,5 cm Handgelenkumfang (cC) 17,5-23 cm Handflächenumfang (cA) 22-24 cm ☐ 104494 ☐ 104495 ☐ 104486 ☐ 104487	Länge (IA-C) bis 15,5 cm Handgelenkumfang (cC) 19,5-25 cm Handflächenumfang (cA) 24-26 cm ☐ 104500 ☐ 104501 ☐ 104492 ☐ 104493

Übernehmen Sie anschließend alle Daten in die Tabelle ein.

Größe	Anzahl	REF
Small kurz	1	104515
Small	1	104491



Vor der Behandlung sollte eine ganzheitliche und vaskuläre Untersuchung stattfinden. Bitte befolgen Sie die lokalen und nationalen Richtlinien.

Indikationen

Adaptives Kompressionssystem für phlebologische, lymphologische Indikationen, z. B. Venenerkrankungen, chronische Ödeme und Lymphödem.

Zum Erhalt oder zur Reduzierung des Flüssigkeitsvolumens und der Form der oberen und unteren Extremitäten.

Vorsichtsmaßnahmen

ABPI < 0,8 – Kompressionstherapie sollte nur unter strenger Aufsicht einer medizinischen Fachkraft oder eines Gefäßspezialisten erfolgen.

Nicht geeignet bei einem Fesselumfang von weniger als 18 cm, außer bei Verwendung einer Polsterung zur Erhöhung des Fesselumfangs auf 18 cm oder höher.

Dieses System kann bei stark exsudierenden und großen Wunden ungeeignet sein.

Wie bei allen Kompressionssystemen ist in folgenden Fällen Vorsicht geboten:

- vermutete kardiale Überlastung
- Diabetes
- fortgeschrittene Einengung der kleinen Koronararterienäste
- Arterienerkrankung
- Niereninsuffizienz
- rheumatoide Arthritis

Falls ein Patient nach dem Anlegen Anzeichen von Schmerzen, einer blässeren Hautfarbe oder Taubheitsgefühlen an den Extremitäten zeigt, sollte ReadyWrap sofort entfernt werden.

Kontraindikationen

- arterielle Insuffizienz oder ABPI < 0,8
- akute tiefe Venenthrombose (TVT)
- unbehandelte Herzinsuffizienz
- unbehandelte Krebserkrankung
- unbehandelte Infektion (z. B. Zellulitis)
- Unverträglichkeit gegenüber dem Material
- schwere oder moderate periphere arterielle Verschlusskrankheit

Pflegehinweise für ReadyWrap

Allgemein

- sorgfältig und vorsichtig anwenden, um Fadenbruch zu vermeiden
- bei Ausschlag, Taubheitsgefühl oder Veränderungen der Hautfarbe nicht mehr verwenden

Waschen

- Handwäsche in warmem Wasser mit einem Tropfen mildem Waschmittel
- gründlich mit warmem Wasser ausspülen
- KEINE Bleichmittel oder Weichspüler verwenden

Trocknen

- zum Trocknen flach ausbreiten
- nicht im Wäschetrockner trocknen und nicht bügeln
- die Trocknungszeit kann verkürzt werden, indem Sie den Verband auf ein Handtuch legen und im Handtuch rollen, damit dieses überschüssiges Wasser aufnimmt
- stellen Sie sicher, dass die VELCRO® Klettverschlüsse nicht mit dem Handtuch in Berührung kommen

Materialien

- ReadyWrap verwendet VELCRO® Klettverschlüsse
- ohne Naturkautschuklatex hergestellt
- Materialzusammensetzung von ReadyWrap:
 - ◆ 61 % Nylon
 - ◆ 33 % Polyurethan
 - ◆ 6 % Elasthan

Erfahren Sie mehr über ReadyWrap®
und unsere Therapielösungen unter
www.SupportforLife.com



Kundenservice

Lohmann & Rauscher bietet mit ReadyWrap ein innovatives adaptives Kompressionssystem für eine leichte Versorgung. Wenn Sie Fragen zu ReadyWrap haben, ist unser Kundendienst von Montag bis Freitag gerne für Sie da:

Für Produkte, die in der Schweiz gekauft wurden:

Lohmann & Rauscher AG

Oberstrasse 222, CH-9014 St. Gallen
info@ch.LRmed.com · +41 (0) 71 2742570

Für mehr Informationen besuchen Sie
www.Lohmann-Rauscher.com

Für Produkte, die in Österreich gekauft wurden:

Lohmann & Rauscher GmbH

Johann-Schorsch-Gasse 4, A-1141 Wien
info@at.lrmed.com · +43 (0) 1 57670-400

Für mehr Informationen besuchen Sie
www.Lohmann-Rauscher.at

Quellen:

- 1) Ehmann, S; Bock, K. (2017). Critical evaluation of bandage alternative characteristics: a case series. EWMA Conference, Amsterdam, Netherlands.
- 2) Robert de Klerk, District Nurse, Buurtzorg Zeeburg, Amsterdam NL; Jeanette Muldoon, Activa Healthcare Ltd., L&R UK. How can VELCRO Compression Systems contribute in Wound Management. Annual Meeting of the European Wound Management Association (EWMA), Amsterdam 3–5 May 2017.
- 3) Hampton, S. (2016). The difficulty and the solution of compression therapy in a healed venous leg ulcer. Br J Community Nursing, 21(9), p34–p38.
- 4) Ehmann, S. (2016). Multinational, pilot audit of a VELCRO adjustable compression wrap system for venous and lymphatic conditions. JWC, 25(9), p513–p520.
- 5) Bock, K.J. (2016). Adjustable compression wraps can prevent ulcer re-occurrence in phlebo-lymphedema; a case series. Poster presentation, SAWC, Austin 2016.
- 6) Guest, J.F; Ayoub, N; McIlwraith, T. et al. (2015). Health economic burden that wounds impose on the National Health Service in the UK. BMJ, Open 5: e00w9283. doi:10.1136/bmjopen-2015-009283.
- 7) Elvin, S. Cost efficacy of using Juxta CURES™ and UCS™ debridement cloths. Journal of Community Nursing, 2015; 29(2), p25–p28.
- 8) Wigg, J; Lee, N. Redefining essential care in lymphoedema. Br J Community Nursing, 2014; 19: Chronic Supple, p24–p29.
- 9) Bianchi, J; Mahoney, K; Nugent, L; Kenn, D. A fresh way to treat venous leg ulcers with measured compression. Br J Community Nursing 2013; 18(4), Suppl, p34–p40.
- 10) Nugent, L. Juxta CURES™: compression for healing venous ulcers. Br J Community Nursing, 2013; 18(5), p40–p45.
- 11) Ellen Kuijper-Kuip, Skin and edematherapist – MediSkin – Total Skin Care; Jeanette Muldoon, Activa Healthcare Ltd., L&R UK. Meeting the practical and economic challenges of managing skin and wounds using self-care as an option for patients with lymphedema. Annual Meeting of the European Wound Management Association (EWMA), Amsterdam, 3–5 May 2017.
- 12) Rabe, E.; Pannier-Fischer, F.; Broman, K.; Schuldt, K.; Stang, A.; Poncar, Ch.; Wittenhorst, M.; Bock, E.; Weber, S. & Jöckel, K. H. (2003). Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Phlebologie, 32(1), p1–p14.
- 13) Muldoon, J.; Hampton, S. (2017). Validity, Inter-rater and Intra-rater reliability of an Adjustable Compression Device Application, SAWC, San Diego 2017.