

# Lomatuell® Pro

## Gelbildendes Kontaktnetz

Ihr Sicherheitsnetz für die Wundheilung.

Einfaches Anlegen

Atraumatische Entfernung

Unterstützt die Wundheilung

[www.Lohmann-Rauscher.com](http://www.Lohmann-Rauscher.com)

# Lomatuell® Pro

## reduziert das Verklebungsrisiko der Wundauflage mit der Wunde

### Produkteigenschaften

### Ihr Nutzen



#### Patienten- komfort

- reduziert das Verklebungsrisiko der Wundauflage mit der Wunde

- hoher Tragekomfort
- schmerzärmer und atraumatischer Verbandwechsel



#### Einfache Anwen- dung

- beidseitig verwendbares Material
- flexibel und anschmiegsam
- zuschneidbar

- einfaches Anlegen und Entfernen
- die Lösung für oberflächliche Wunden in jeder Exsudationsphase
- kein täglicher Verbandwechsel erforderlich\*



#### Unterstützt die Wund- heilung

- Hydrokolloidpartikel gelieren in Kontakt mit Wundexsudat
- Gittertüll mit offener Netzstruktur
- guter Kontakt zum Wundgrund

- Behandlung von oberflächlichen akuten und chronischen Wunden
- lange Verbandwechselintervalle\*
- guter Exsudatabfluss in den Sekundärverband

\* In Abhängigkeit von der Wundsituation und der Sekundärauflage nach durchschnittlich 2–4 Tagen, spätestens nach 7 Tagen.

### Lomatuell® Pro beeindruckt in der Studie:<sup>1</sup>

Lomatuell Pro unterstützt  
die Wundheilung.

# 61,5 %

der Patienten erreichten bis Tag  
21 ± 2 ein Abheilen der Wunde.

Lomatuell Pro ist UrgoTül™  
hinsichtlich der Schmerzreduktion  
nicht unterlegen. Bei

# 97,4 %

der Patienten  
waren die Schmerzen mit  
Lomatuell Pro nur minimal.  
Gemessen beim ersten Verband-  
wechsel an Tag 3 ± 2 mittels VAS.

Überwiegend

## sehr guter

Gesamteindruck der Prüfarzte  
und Patienten.



Die Einschätzungen hinsichtlich  
einfacher Anwendung, Anschmiegsamkeit, Verkleben mit der Wunde  
sowie leichter und schneller Ent-  
fernung waren in der Gruppe mit  
Lomatuell Pro im Vergleich zu der  
mit UrgoTül™ etwas

## besser.

(statistisch  
signifikant  
p < 0,05)

# Lomatuell® Pro

## Für oberflächliche akute und chronische Wunden.

### Für welche Indikationen ist Lomatuell® Pro geeignet?

#### Exsudationsgrad



Trockene bis stark exsudierende Wunden

#### Wundtiefe




Oberflächliche Wunden

#### Wundstadium

- belegte Wunde
- granulierende Wunde
- epithelisierende Wunde

#### Wundart

**Chronische Wunden:**  
z. B. Ulcus cruris,  
diabetische Fußulcera  
und Dekubitus

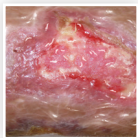

Beinulzera


**Akute Wunden:**  
z. B. Riss-, Schnitt-  
und Schürfwunden,  
Verbrennungen  
zweiten Grades



Schürfwunde

**Post-chirurgische Wunden:**

z. B. sekundär heilen-  
de OP-Wunden, Spalt-  
hautentnahmestellen

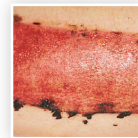

Spalthautentnahme


### Einfaches Anlegen und Entfernen.

**Schritt 1**  
**Debridement**  
mit Debrisoft  
oder Debrisoft Duo



Debrisoft Pad


**Schritt 2a**  
**Wundversorgung**  
Auswahl der primären  
Wundauflage  
Lomatuell Pro

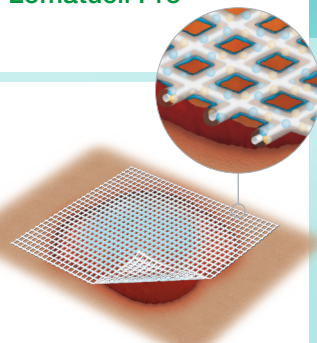

Lomatuell Pro

Reduzierung des Verklebungsrisikos der Wundauflage mit der Wunde und Unterstützung der Wundheilung

**Schritt 2b**  
**Wundversorgung**  
Auswahl des  
Sekundärverbandes,  
z. B. Suprasorb P

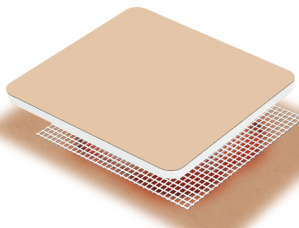

Suprasorb P

weitere Sekundärverbände z. B. Gazin, Vliwasoft, Vliwazell, Vliwasorb, Vliwaktiv, Vliwaktiv Ag, Solvaline N, Suprasorb F Protect, Curafix H

**Schritt 3**  
**Kompression**  
Der richtige Druck ist  
der Schlüssel zum  
Therapieerfolg



Rosidal

Kompetenz in der Kompressionstherapie

**Lomatuell Pro**  
ist anwendbar in der  
Kompressionstherapie



## Lomatuell® Pro

### Gelbildendes Kontaktnetz



**Patientenkomfort**



**Einfache  
Anwendung**



**Unterstützt  
die Wundheilung**



Sie möchten mehr über  
**Lomatuell Pro** erfahren?  
Einfach den QR-Code  
scannen...



## Lomatuell® Pro

### Gelbildendes Kontaktnetz

| Größe (cm) | REF     | Pharmacode | VE (Stk.) |
|------------|---------|------------|-----------|
| 5 x 5      | 30 870  | 6143031    | 10/360    |
| 10 x 10    | 30 871  | 6143048    | 10/120    |
| 10 x 10    | 30 874  | 6143054    | 50/450    |
| 10 x 20    | 30 872  | 6143060    | 10/120    |
| 10 x 30    | 30 873  | 6143077    | 10/80     |
| 10 x 40    | 220 000 | 7781231    | 10/120    |
| 15 x 20    | 220 001 | 7781232    | 5/50      |
| 15 x 30    | 220 002 | 7781233    | 5/55      |

#### Quelle:

1) Malatesta A, Roux F, Trofimenko D, Abel M. Non-inferiority randomised controlled trial of two contact layer dressings for the treatment of acute wounds (SLALOM). J Wound Care. 2025 Jul 2;34(7):496-505.



**Tipp:** Lomatuell Pro ist auch im Rahmen  
der Unterdrucktherapie mit  
**Suprasorb CNP P3** nutzbar.\*



\* basierend auf In-vitro-Untersuchungen.

#### Herausgeber

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Irlicher Straße 55, D-56567 Neuwied  
Lohmann & Rauscher GmbH, Kirchengasse 17, A-2525 Schönaun an der Triesting

#### Kontaktadresse

Lohmann & Rauscher AG, Oberstrasse 222, CH-9014 St. Gallen