



People.Health.Care.

Kurzbedienungsanleitung der Therapieeinheit




endo

1. Suprasorb® CNP endo Therapieeinheit



- A Einweg-Exsudatbehälter mit integriertem Exsudatbehälterschlauch
- B Verriegelung für Behälter
- C Tasten  (Ein) und  (Aus)
- D Display
- E Plus-  und Minustaste 
- F **Suprasorb CNP endo** Therapieeinheit
- G Anschluss für Netzgerät

Anschluss des Einweg-Exsudatbehälters an die Suprasorb® CNP endo Therapieeinheit

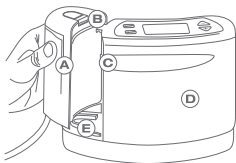


- A Einweg-Exsudatbehälter inkl. Exsudatbehälterschlauch
- B Verriegelung für Behälter
- C Sauganschluss
- D **Suprasorb CNP endo** Therapieeinheit
- E Führungsschiene

1. Nehmen Sie den Einweg-Exsudatbehälter (A) aus der Verpackung.
2. Schieben Sie den Behälter auf die Führungsschiene (E) an der **Suprasorb CNP endo** Therapieeinheit, bis der Einweg-Exsudatbehälter hörbar an der Verriegelung (B) einrastet.


Verbinden Sie den Schlauch des Einweg-Exsudatbehälters mit der Drainage.

2. Behälterwechsel

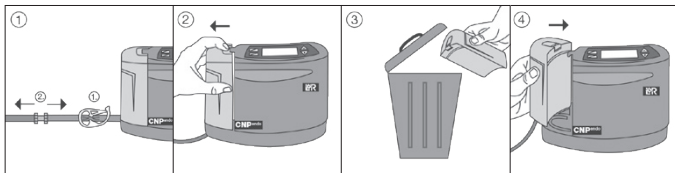

1. Drainageschlauch abklemmen
2. Exsudatbehälterschlauch abklemmen (Abb. 1-1).
3. Therapie pausieren, oder Gerät ausschalten
4. Exsudatbehälterschlauch vom Drainageschlauch lösen (Abb. 1-2)
5. Einweg-Exsudatbehälter-Verriegelung drücken und abziehen.
6. Entsorgen Sie den Einweg-Exsudatbehälter ordnungsgemäß (Abb. 3).
7. Fixieren Sie einen neuen Einweg-Exsudatbehälter an der Therapieeinheit (Abb. 4).
8. Verbinden Sie den Exsudatbehälterschlauch mit dem Drainageschlauch.
9. Lösen Sie die Klemmen am Drainageschlauch.
10. Therapie starten (siehe nächste Seite).

3. Inbetriebnahme

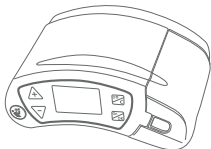

Suprasorb® CNP endo
Therapieeinheit mit
angeschlossenem Behälter horizontal

Der Druckwert des Unterdrucks kann von -40 mmHg bis -125 mmHg in 5 mmHg-Schritten eingestellt werden. Voreingestellt sind -125 mmHg.



1. Drücken Sie 1-2 Sekunden lang die Taste , um die **Suprasorb CNP endo** Therapieeinheit einzuschalten. Der folgende Start-Screen erscheint für 5 Sekunden.



2. Es erscheint der Übersichtsbildschirm.



3. Mit der Plus- und Minustaste   können Sie den verordneten Unterdruck einstellen und mit der Taste  können Sie die Therapie beginnen. Es erscheint der Therapiebildschirm. (Voreinstellung des Sollwerts: -125 mmHg)



4. Drücken Sie die Taste , um die Therapie zu stoppen.



5. Schalten Sie die **Suprasorb CNP endo** Therapieeinheit aus, indem Sie 3 Sekunden lang die Taste  drücken.

Tastensperre lösen

Zum Deaktivieren drücken Sie   gleichzeitig.

Die Therapieeinheit darf nicht auf dem Kopf stehend betrieben werden.

Laufzeit im Akkubetrieb ca. 24-48 Stunden
Ladezeit bei leerem Akku 6-7 Stunden


4. Fehlerbehebung



Netzgerät anschließen.



Netzgerät kurz einstecken und wieder entfernen. Tritt der Fehler 60 Sekunden nach dem Neustart wieder auf, wenden Sie sich an L&R.

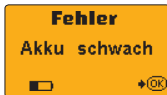


Netzgerät bald anschließen.



Therapie starten.

Therapie ausschalten.

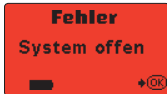

Korrekte Anschlüsse prüfen.
Lage der Drainage prüfen.
Therapie starten.



Schlauchanschlüsse und Einweg-Exsudatbehälter überprüfen. Therapieeinheit ausschalten oder pausieren. Wundbereich optisch/endskopisch kontrollieren. Ggf. CO₂-Insufflation beenden. Therapieeinheit wieder einschalten bzw. Therapie starten.



Therapieeinheit ausschalten oder pausieren. Einweg-Exsudatbehälter prüfen und gegebenenfalls wechseln. Schläuche prüfen. Schlauchklemme öffnen.

Kontaktieren Sie L&R, wenn ein aufgetretener Fehler nicht mit den hier beschriebenen Maßnahmen behoben werden kann.

5. Weiterführende Informationen

Nähere Informationen zur CNP endo Therapieeinheit finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

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
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre L&R Ansprechpartner:innen.

6. Kontaktdaten

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4
D-56579 Rengsdorf

CNP Service-Hotline:
0800 6647435

**L&R CNP Team –
Ihre Ansprechpartner:innen**



www.lohmann-rauscher.com

9510366 0924 de