



People.Health.Care.

Suprasorb® CNP präsentiert:

VivereX®

Unser handliches Single Use System
für Ihre Unterdrucktherapie.

Generation

2.0



Suprasorb® CNP präsentiert:

VivereX®

Hilfreiche Informationen
zu Ihrem neuen Therapiesystem.

Liebe Patientin, lieber Patient,

zur Behandlung Ihrer Wunde hat sich Ihr Arzt für das VivereX System zum Einmalgebrauch entschieden. Auf den folgenden Seiten haben wir alle wichtigen Informationen über die Therapie für Sie zusammengestellt, damit Sie die Behandlung erfolgreich in Ihren Alltag integrieren können.

Durch das Befolgen unserer Anwendungstipps können Sie einen zusätzlichen Beitrag zur Verbesserung der Wundheilung leisten. Bitte bedenken Sie jedoch, dass Wundverbände nur von qualifiziertem medizinischem Fachpersonal angelegt werden dürfen.

Wir wünschen Ihnen eine baldige Genesung!



1. Was ist im VivereX® Lieferumfang enthalten?	4
2. Wie funktioniert VivereX®?	4
3. Wie verwende ich VivereX® und wann sollte der Verband gewechselt werden?	5
4. Wie kann ich die Therapie in meinen Alltag integrieren?	6
5. Wie gehe ich mit Leuchtmeldungen um?	9
6. Wann sollte ich mich an meinen Arzt bzw. meine Pflegekraft wenden?	10
7. Hilfreiche Telefonnummern	11



VIVEREX

Das von Sunmedic in Schweden entwickelte VivereX® System wird nun von L&R zum Patienten gebracht.

1. Was ist im VivereX® Lieferumfang enthalten?

Das VivereX System besteht aus einer kleinen, leichten Pumpe, die mit einem selbsthaftenden, saugfähigen Wundverband verbunden ist. Die Pumpe ist so programmiert, dass an der Wundfläche ein vorher festgelegter Unterdruck entsteht. Der gebrauchsfertige Wundverband besteht aus mehreren Schichten und ist mit einem Silikonhafrand versehen, sodass Wundexsudat aus der Wunde aufgenommen werden kann. Der Silikonhafrand sorgt außerdem dafür, dass der Wundverband nicht verrutscht und besonders schmerzarm abgenommen werden kann. Der Wundverband trägt dazu bei, dass das Eindringen von Bakterien in die Wunde verhindert wird.

2. Wie funktioniert VivereX®?

Ihr Arzt hat das VivereX Wundtherapiesystem als bestmögliche Behandlungsoption für Ihre Wunde ausgewählt. Diese moderne Behandlungsmethode wird auch als Unterdruck-Wundtherapie bezeichnet (Negative Pressure Wound Therapy [NPWT] bzw. Controlled Negative Pressure Therapy [CNP Therapie]).

Das VivereX Gerät erzeugt einen Unterdruck, der die Wundsekrete (Exsudat) aus der Wunde ableitet. Auch die Durchblutung der Wunde kann sich verbessern, was die Wundheilung begünstigt. Gleichzeitig wird die Bildung von neuem, gesundem Gewebe gefördert.



VivereX lässt sich ganz unauffällig verstauen, beispielsweise in Ihrer Hosentasche.

3. Wie verwende ich VivereX® und wann sollte der Verband gewechselt werden?

Das Statusfenster zeigt an, ob das VivereX Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Das Statusfenster umfasst 4 Leuchtanzeigen. Wenn die grüne Wundtherapie-Anzeige blinkt, funktioniert das Gerät ordnungsgemäß.

Druckknopf zum Ein- und Ausschalten.

Verbindungsanschluss für den Schlauch.


Optische Sicherheitsanzeigen.

Batteriefach auf der Rückseite.



Das Statusfenster zeigt an, ob das VivereX Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn die grüne Wundtherapie-Anzeige blinkt, funktioniert das Gerät ordnungsgemäß.

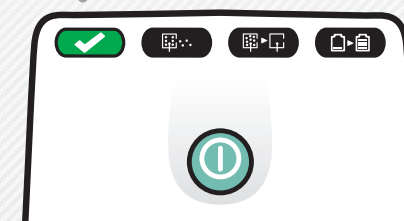

VivereX verfügt über eine Leuchtanzeige, die Ihnen mitteilt, wenn der Wundverband gewechselt werden sollte (siehe Seite 9). Die Entscheidung, ob und wann der Wundverband gewechselt werden muss, liegt im Ermessen Ihres Arztes bzw. Ihrer Pflegekraft.




4. Wie kann ich die Therapie in meinen Alltag integrieren?

Kann ich mich während der Therapie bewegen?

Sie können sich wie gewohnt frei bewegen, solange der Wundverband dabei nicht verrutscht und mit der VivereX Pumpe verbunden bleibt. Verstecken Sie das Gerät in Ihrer Hosentasche oder nutzen Sie den Gürtelclip. Dies ist dank des dezenten Designs des VivereX Systems problemlos möglich.

Ist die Behandlung mit dem VivereX® System schmerzhaft?

Der VivereX Wundverband verfügt über eine schonende, selbsthaftende Wundkontaktschicht aus Silikon, die sich nahezu schmerzfrei abnehmen lässt. In seltenen Fällen treten ein paar Minuten nach dem Einschalten der Pumpe leichte Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl auf. Wenn Ihnen Ihr Arzt Schmerzmittel verordnet hat, nehmen Sie diese wie verordnet ein.

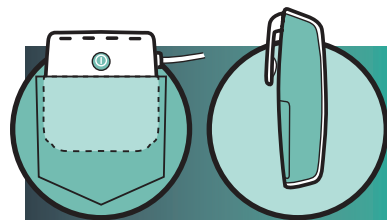

Das kleine, leichte Gerät passt problemlos in die Hosentasche. VivereX ist mit einem Clip an der Rückseite ausgestattet, sodass es sich am Hosenzug befestigen lässt.

Kann ich mit VivereX® duschen?

Um zu duschen, müssen Sie die VivereX Pumpe abnehmen. Der Wundverband muss beim Duschen oder Waschen nicht abgenommen werden. Der Wundverband ist zwar wasserfest, Sie sollten ihn aber keinem direkten Wasserstrahl aussetzen oder in Wasser tauchen, da er sich dadurch ablösen kann.

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen genau, wenn Sie duschen möchten:

- 1 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.
- 2 Trennen Sie das VivereX Gerät vom Wundverband und legen Sie es an einem sicheren Ort ab.
- 3 Das Ende des Verbandschlauches sollte nach unten hängen, damit kein Wasser eindringen kann.
- 4 Der Wundverband sollte keinesfalls in Wasser getaucht oder einem Wasserstrahl ausgesetzt werden.
- 5 Verbinden Sie den Wundverband nach dem Duschen wieder mit dem Gerät.
- 6 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.
- 7 Prüfen Sie, ob die grüne Wundtherapie-Anzeige blinkt, der Wundverband verbunden ist und keine Leuchtanzeigen aktiv sind.





Reinigung

Sie können die Oberflächen des VivereX Geräts bei Bedarf mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten, weichen Tuch reinigen.

Vor dem Zubettgehen

Sie sollten das Therapiegerät nachts nicht ausschalten. Positionieren Sie das VivereX Gerät so, dass es während der Nacht nicht herunterfallen kann. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht abknickt.

Wie lange muss meine Wunde mit VivereX® behandelt werden?

Die Behandlungsdauer richtet sich nach Art und Größe Ihrer Wunde. Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, ob und wann der Wundverband zu wechseln ist und wie lange die Behandlung in etwa dauern wird. Sie sollten unbedingt alle Arzttermine einhalten und Ihren Arzt oder Ihre Pflegekraft bei Problemen informieren.

5. Wie gehe ich mit Leuchtanzeigen um?

Machen Sie sich mit der Bedeutung der Leuchtanzeigen und den Anweisungen vertraut.



Niedriger Batteriestand?

Bei einem niedrigen Batteriestand leuchtet sowohl die grüne Therapie-LED als auch die orangefarbene Batterie-LED. In diesem Fall sollten die Batterien innerhalb der nächsten 24 Stunden gewechselt werden. Blinkt nur die orangefarbene Batterie-LED, reicht die Batterieleistung für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Therapiegerätes nicht mehr aus.

Die Batterien müssen dann sofort gewechselt werden. Hinweise zum Wechseln der Batterien sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

6. Wann sollte ich mich an meinen Arzt bzw. meine Pflegekraft wenden?

- 1 Wenn sich der Wundverband ablöst.** Bedecken Sie den Bereich mit einer sterilen Wundauflage und benachrichtigen Sie Ihren Arzt.
- 2 Wenn alle Leuchtanzeigen leuchten.**
- 3 Wenn die orangefarbene Leckage-Anzeige oder Verbandwechsel-LED blinkt.**
- 4 Wenn das Gerät häufig Geräusche von sich gibt oder laut wird.**
Das kann darauf hindeuten, dass die Abdichtung beschädigt wurde.
- 5 Wenn Sie Anzeichen einer Infektion aufweisen, wie:**
 - Schwellung, Überwärmung oder Rötung im Wundbereich
 - Starke Schmerzen
 - Eiterbildung
 - Fieber



7. Hilfreiche Telefonnummern





People.Health.Care.