



People.Health.Care.

Suprasorb® CNP

Sortiments- übersicht

Ausgabe 04/2026

Suprasorb®

Controlled
Negative
Pressure

CNP P3

Anwenderfreundlich. Flexibel. Wirtschaftlich.

Als Anbieter zukunftsorientierter Medizin- und Hygieneprodukte stellen wir Ihnen unser Therapie-system vor. Anwenderfreundlich, flexibel, wirtschaftlich und mit noch mehr Möglichkeiten – bei der Durchführung von Therapien und der Optimierung von Heilungsprozessen.

CNP P3. One System. All Options.

Das CNP P3 System ist auf Ihren Praxisalltag zugeschnitten. Die Bedienung der zuverlässigen Therapieeinheit funktioniert intuitiv, die Bildschirme sind übersichtlich und selbsterklärend gestaltet. Unsere Benutzerführung leitet Sie durch die CNP P3 Therapie, die Einstellungen und die Modi.

Verlassen Sie sich auf präzise abgestimmte Komponenten, die Sie direkt zur Wunde leiten. Von hier aus entscheiden Sie individuell über den weiteren Verlauf der Therapie. Sie wählen flexibel aus den innovativen Möglichkeiten: Tiefendrainage, Drainagefolie und EasyDress.

Schritt für Schritt zur passenden Therapie:
Ihr CNP P3 Therapiesystem.



Ihre Therapie, Ihr System:

Suprasorb
CNP P3
Therapiesystem
Gesamtübersicht

Seite 4–5

Suprasorb
CNP P3
Therapieeinheit

Seite 6–9

Suprasorb
CNP
Tiefendrainage

Seite 10–11

Suprasorb
CNP
Drainagefolie

Seite 12–13

Suprasorb
CNP EasyDress &
EasyDress
Fixateur Externe

Seite 14–15

Suprasorb
CNP Kits

Seite 18

Suprasorb
CNP Bestellübersicht

Seite 20–23

CNP P3 Therapie

One System. All Options.

P3 Therapieeinheit

- selbsterklärende Bildschirme
- Grafiken und Texte zur Anwendung
- aussagekräftige Farbcodes

Gewährleistet einen intuitiven Umgang, spart Zeit und gibt Sicherheit.¹

ZUM PATENT ANGEMELDET

Tiefendrainage

- leitet Exsudat direkt aus der Tiefe der Wunde ab²
- fördert bis zu 135 % mehr Flüssigkeit als konventionelle Ableitungen²
- hält den Druck in der Tiefe konstant²



PATENTIERT

EasyDress Fixateur Externe

PATENTIERT

MIT INNOVATIONSPREIS AUSGEZEICHNET

EasyDress

- dichtet Wunden an Extremitäten einfach und zuverlässig ab
- ist deutlich schneller dicht als konventionelle Abklebmethoden
- schont die intakte Umgebungshaut

Behälter und Exsudatbeutel

in den Größen 250 ml und 1.000 ml ermöglichen:

- wirtschaftlichen Umgang
- platzsparende Lagerhaltung
- universellen Einsatz in der Klinik und im ambulanten Bereich

ZUM PATENT ANGEMELDET

Y-Konnektor

- ermöglicht zwei belüftete Ableitungen aus dem Wundbereich²
- stabiles einteiliges Design
- Konnektion erfolgt schnell und einfach

Drainagepad

- verbesserter Durchfluss
- stabil gegen Abknicken
- Schlauch individuell kürzbar

PATENTIERT

MIT INNOVATIONSPREIS AUSGEZEICHNET

Drainagefolie

- schützt Organe und sensible Strukturen
- hohe Drainagefähigkeit durch Exsudattransport über die gesamte Folienfläche
- individuell zuschneidbar und modellierbar

Suprasorb®

CNP P3 Therapieeinheit

Universell. Zeitsparend.¹ Zuverlässig.

Die P3 ist das Herzstück der Suprasorb CNP Therapie. Ihr Design: optisch ansprechend, modern und funktional. Glatte Oberflächen und abgerundete Kanten ermöglichen eine einfache Reinigung.

Die Einsatzmöglichkeiten der P3 sind universell – in der Klinik und im ambulanten Bereich. Ihr kompakter Aufbau und die Ausstattung mit zwei Behältern/Exsudatbeutel-Größen ermöglichen viele unterschiedliche Anwendungen. Die CNP P3 Therapieeinheit ist eine für alles und alles in einem.

Sehr anwenderfreundlich.

Die P3 zeichnet sich durch selbsterklärende Bildschirme und eine klare Menüführung aus. Ihre Bedienung funktioniert intuitiv. So arbeiten Sie sicher und zeitsparend.¹

Wirtschaftlich. Ganz in Ihrem Sinn.

Ökonomisches Denken, Produzieren und Handeln ist für uns selbstverständlich. So auch bei der Entwicklung des Suprasorb CNP P3 Systems.

Das Vorhalten mehrerer Systeme ist nun überflüssig, da sich das Suprasorb CNP P3 System universell für alle Anforderungen der CNP Therapie einsetzen lässt. Außerdem ist die Behälter/Exsudatbeutel Kombination in zwei Größen so ausgelegt, dass der Behälter langfristig wiederverwendbar ist. Ausgetauscht und entsorgt wird lediglich der Exsudatbeutel. Das reduziert Lagerfläche und Lagerkosten.

Das ist wirtschaftlich. Ganz in Ihrem Sinn.

CNP steht für „Controlled Negative Pressure“.

„Controlled Negative Pressure“ gilt für die CNP Therapie heute mehr denn je.

Die P3 arbeitet – gemeinsam mit den eigens entwickelten High-Tech Komponenten – gezielt und anlassbezogen. Sie kontrolliert den von Ihnen gewählten Unterdruck zuverlässig und stetig und hält ihn konstant aufrecht. Mehr denn je CNP.



Suprasorb®

CNP P3

Die intuitive Therapieeinheit für einfaches Arbeiten.

Leuchtbalken

Therapieeinheit läuft einwandfrei

Fehlermeldung

Therapie-Modus

Druck-Einstellung

Sensitivitäts-Einstellung

Seal Level

Bildschirm Sperre

Kontroll-Lampe Netzteil


On-/Off-Button

Stummschalten des Signaltons


Wiederverwendbarer Behälter 250 ml mit CNP Exsudatbeutel 250 ml (alternative Größe: 1.000 ml)

Farben sagen mehr als Worte

Die Farbcodes der P3 lassen schnell erkennen, in welchem Betriebszustand sich die Therapieeinheit befindet: Einstellungen werden auf grauem Hintergrund vorgenommen. Grün ist gleichbedeutend mit „Therapie läuft“. Der orangefarbene Bildschirm zeigt Ihnen, dass die Therapie pausiert. Sehen Sie Rot, dann ist eine Fehlermeldung erschienen und bittet Sie um Bearbeitung.

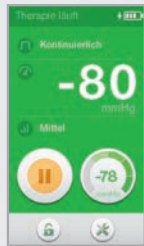

Laufende Therapie

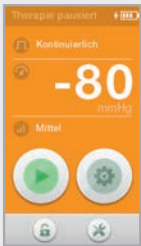

Pausierte Therapie



Fehlermeldungen: Grafiken und Text schaffen Klarheit (Fehler-Beispiel 1/8)



Therapiemodus: Wahl von Therapieform, Druck, Sensitivität

Therapiemodus und Druckeinstellung

Die Therapieeinheit P3 lässt Ihnen die Wahl zwischen „Kontinuierlichem und Intermittierendem Therapie-modus“. Standardeinstellungen für die CNP Therapie sind ebenfalls in der P3 gespeichert.

Unter „Einstellungen“ haben Sie die Möglichkeit, den Therapiemodus und den Druck Ihren Therapie-ansprüchen gemäß anzupassen.



Seal Level

Behalten Sie den Überblick. Mit der Therapie startet auch der Seal Level. Das radförmige Element mit den grünen Segmenten visualisiert für Sie den beginnenden Druck-aufbau. Anschließend wird der Grad der Dichtigkeit ange-zeigt. So bleiben Sie kontinuierlich über die Qualität und den Status des Unterdruckverbandes informiert.

Wichtig: Der Idealzustand ist erreicht, wenn die „mmHg-Anzeige“ im Seal Level-Bereich der großen Zahl im Druckeinstellungsbereich entspricht.



Leuchtbalken

Der Leuchtbalken stellt ein zusätzliches Tool zur Orien-tierung dar. Er informiert, ob Handlungsbedarf gegeben oder ob alles in Ordnung ist. Ein grüner Leuchtbalken ist gleichbedeutend mit einer einwandfrei laufenden Thera-pie. Ist der Leuchtbalken orange, erscheint parallel dazu die Fehlermeldung auf dem Bildschirm, die Sie direkt mit der nötigen Aktion vertraut macht.

Schon ein Blick ins Patientenzimmer von der Tür aus reicht, um die Farbe des Leuchtbalkens und damit den Therapiestatus zu erkennen.




CNP Tiefendrainage

Die Speziallösung in der Tiefe der Wunde.

Unterdrucktherapie spannend anders

Sie ist eigens für das System entwickelt, durch aktive Steuerung belüftet und daher einzigartig am Markt. Die Suprasorb CNP Tiefendrainage bietet eine ebenso intelligente wie effiziente Alternative zu konventionellen Lösungen.



Ihr Platz ist unmittelbar in der Wunde. Von dort leitet die Tiefendrainage ebenso unmittelbar Exsudat aus der Wunde.²

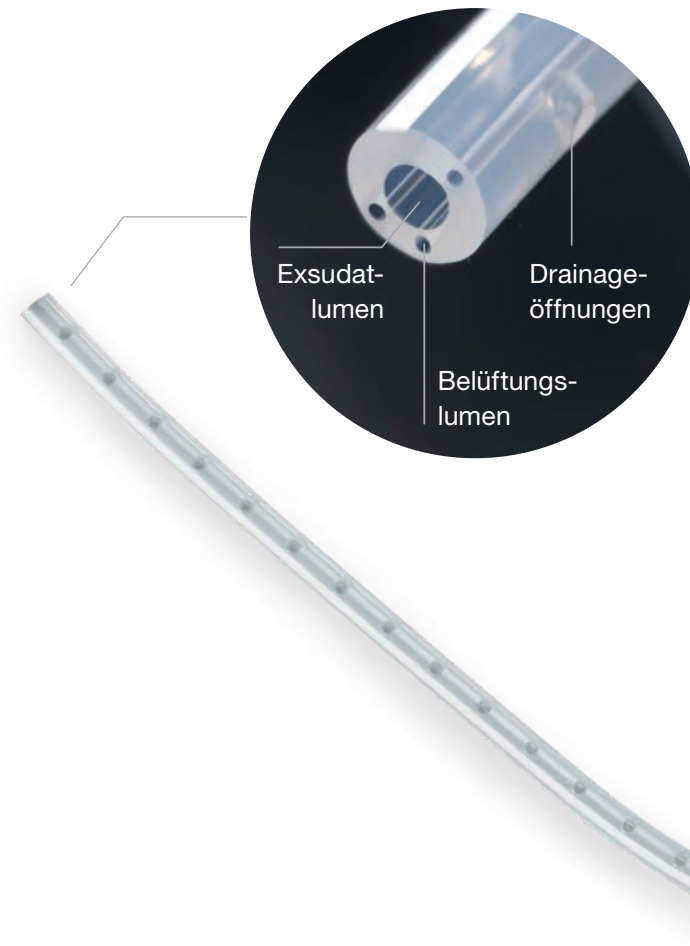

In einem Zeitraum von 120 Minuten leitete die Suprasorb CNP Tiefendrainage mehr als doppelt so viel Exsudat aus der Tiefe wie eine konventionelle Ableitung des Wettbewerbs von der Oberfläche.²

Die Vorteile auf einen Blick²

- Die Tiefendrainage startet mit dem Abtransport des Exsudats deutlich schneller als alternative Lösungen.²
- Im selben Zeitraum wird – dank Tiefendrainage – deutlich mehr Exsudat aus der Wunde geleitet als mit alternativen Lösungen.²
- Die Tiefendrainage ermöglicht das Erkennen einer Blockade entlang ihres gesamten Verlaufs, auch in der Tiefe der Wunde.²
- Die Suprasorb CNP Tiefendrainage lässt in den Testungen nicht nur konventionelle Ableitungen von der Oberfläche, sondern auch die systemimmanente Tiefendrainage des Wettbewerbs klar hinter sich.²

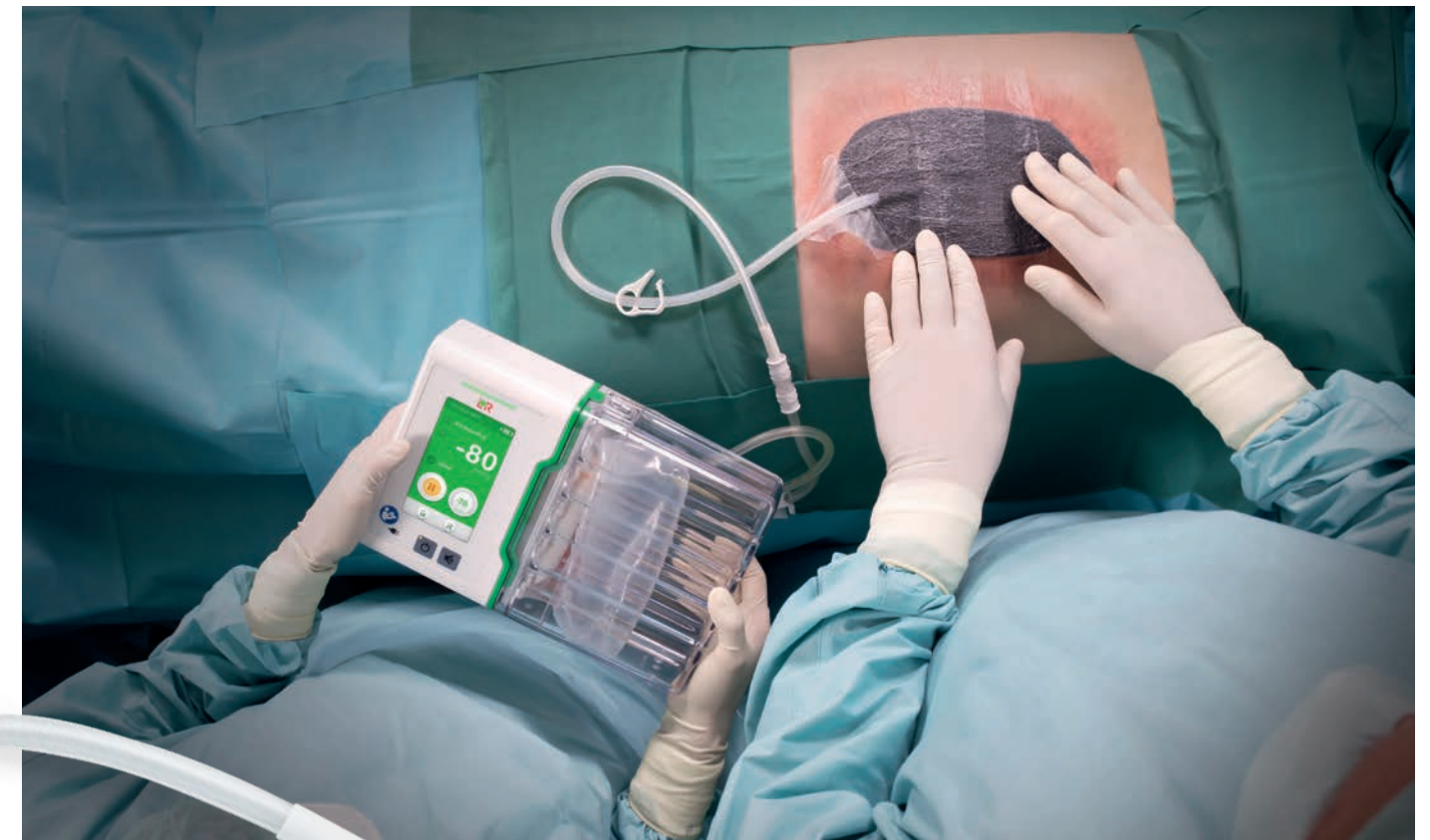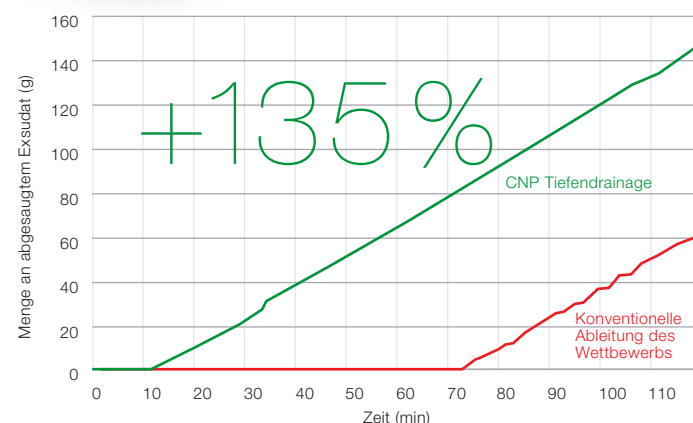

Fallbeispiel Tiefendrainage

Einsatz nach Sepsis bei großflächigem Dekubitus IV. Grades sacral und gluteal.⁴


38-jähriger männlicher Patient, stationäre Aufnahme mit Sepsis bei großflächigem Dekubitus IV. Grades sacral und gluteal und III.-gradigem Dekubitus im Bereich der Oberschenkel

Histologie:

Großflächiges Weichteildébridement mit Anlage eines Vakuumverbandes sowie Versorgung der flacheren Wunden, Regelmäßige Verbandswechsel in Narkose.

Aufgrund der Nähe der Wunde zum After bestand bei bestehender Stuhlinkontinenz mit flüssigen Stühlen das Problem des Übertritts von Stuhl in die Wunde unter den eingebrachten Schwamm.

Daher Entschluss zum Wechsel vom bisherigen hausinternen System zur Nutzung der Suprasorb CNP Tiefendrainage mit Suprasorb CNP P3.

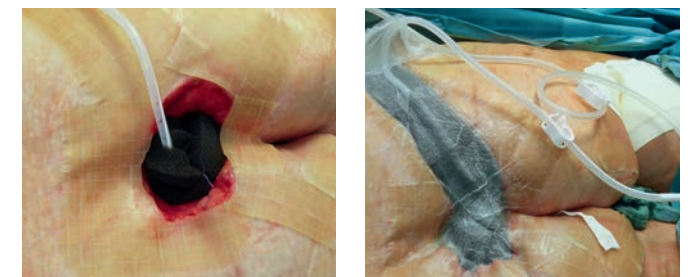

Das Fazit:

Bei nachgewiesener Wirksamkeit der Vakuumtherapie bei offenen Wunden verschiedener Ausprägung eröffnet die Suprasorb CNP Tiefendrainage im Rahmen dieser Therapieform die Möglichkeit einer suffizienteren direkten Ableitung von sich auf dem Wundgrund ansammelndem Sekret. Insofern ist sie vor allem zur Verwendung bei sehr tiefen Wunden mit hoher Sekretionsmenge gut geeignet.

Erfahren Sie hier mehr Details zu dem Fallbeispiel.



Suprasorb®

CNP Drainagefolie

High-Tech Lösung. Für das offene Abdomen und Extremitäten.

Speziell für den Einsatz am offenen Abdomen hat L&R die Suprasorb CNP Drainagefolie entwickelt. Die Organschuttschicht mit Drainageeffekt lässt sich anmodellieren, verrutscht nicht, ist sehr verträglich und kommt direkt auf Organen und sensiblen Strukturen zum Einsatz.


Die Konstruktion der Drainagefolie verhindert ein Kollabieren des freien Drainageraums zwischen den beiden Lagen, unterstützt durch die zahlreichen kegelförmigen Poren. So ist eine Sogverteilung über die gesamte Fläche bis in die Randbereiche gewährleistet. Die Drainagefolie transportiert das Exsudat effektiv ab – auch aus tiefen Bereichen des Bauchraums.

Die Drainagefolie lässt sich – bei gleichbleibender Wirkung – auf jede benötigte Größe zurechtschneiden.

Die Vorteile auf einen Blick

- schützt Organe und sensible Strukturen
- hohe Drainagefähigkeit durch Exsudattransport über die gesamte Folienfläche
- individuell zuschneidbar und modellierbar
- identische Geometrie der Seiten gibt Sicherheit beim Einlegen

Funktionsweise der Drainagefolie

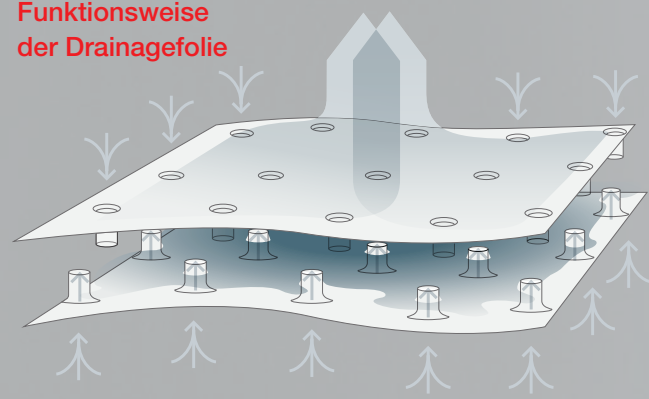

Suprasorb®

CNP Drainagefolie

Anwendung in fünf Schritten.

1. Entnehmen Sie die Drainagefolie der sterilen Verpackung und der Sterilgut-Innenumhüllung.
2. Platzieren Sie die Suprasorb CNP Drainagefolie über der zu behandelnden Wundhöhle, um die richtige Größe zu ermitteln.
3. Entfernen Sie die Folie wieder aus dem Wundbereich und schneiden Sie diese bei Bedarf auf die gewünschte Größe zu.
4. Legen Sie die Suprasorb CNP Drainagefolie vorsichtig in die Wunde bzw. abzudeckende Stelle ein, um keine Gewebestrukturen zu zerstören bzw. zu irritieren. Achten Sie darauf, dass alle Wundtaschen ausgekleidet sind.
5. Fahren Sie nun wie gewohnt mit der Applikation des Verbandsystems fort.

Unser Tipp:

Tränken Sie die Suprasorb CNP Drainagefolie mit **steriler Kochsalz- oder Ringer-Lösung**, um eine **einfachere Applikation und Entnahme** zu gewährleisten.

Das Handling der Drainagefolie ist sehr einfach und sicher. Zwei identische Seiten machen ein verkehrtes Einlegen unmöglich, außerdem ermöglicht die Konstruktion ein Zuschneiden ganz nach Ihren Bedürfnissen. Dank der glatten Oberfläche ist ein gutes Anmodellieren der Drainagefolie – gleich wo – gewährleistet. Selbst an tiefe Höhlen oder schwer zugängliche Wundbereiche können Sie die Drainagefolie anpassen.



Fallbeispiel Drainagefolie


Erfolgreiche Behandlung einer Dünndarmfistel mittels Suprasorb CNP Drainagefolie unter kontinuierlichem Sog.⁵

59 J., männlich, primär Diskusprolaps L3/L4, Adipositas (160 kg), mehrere Revisionen aufgrund einer Heparininduzierten Thrombopenie.

4 Tage nach der letzten Revision → paralytischer Ileus mit prall gespanntem Abdomen.

Notfalllaparotomie zeigte mehrere Tännienrisse des Kolons. Übernähung der Serosadefekte, 4-Quadrantenlavage und folgend Bauchdeckenverschluss.

Postoperativ entwickelte sich ein Kompartmentsyndrom (IAP = 25–27 mmHg).

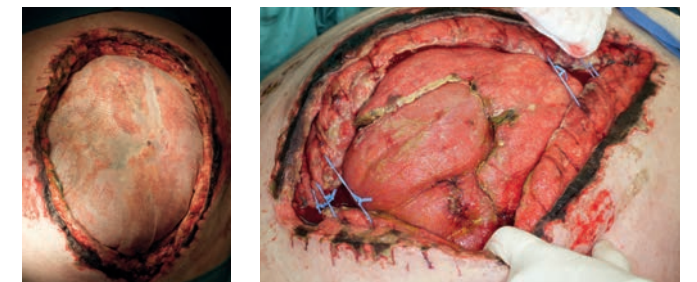

Das Ergebnis:

Nach 10 Tagen Therapie mit Suprasorb CNP Drainagefolie kann die Bauchdecke verschlossen und nachfolgend mit Spalthaut gedeckt werden.

Erfahren Sie hier mehr Details zu dem Fallbeispiel.



Suprasorb®

CNP EasyDress & EasyDress Fixateur Externe

3D Innovation für Unterdrucktherapie an Extremitäten.

Überziehen – fixieren – Therapie starten. So einfach ist EasyDress. Dank 3D Geometrie und flexiblem Spezialmaterial ist der Unterdruckverband deutlich schneller dicht als konventionelle Abklebmethoden. Die Zeitersparnis liegt bei bis zu 90 %.³

EasyDress lässt sich einfach ohne Hilfe anbringen. Er ist in unterschiedlichen Größen erhältlich und auf die benötigte Länge zuschneidbar – dadurch gewährleistet er zum einen die sehr gute Anpassung an unterschiedliche Anatomien oberer und unterer Extremitäten, zum anderen die Versorgung selbst schwieriger Wundlokalisationen.

EasyDress besticht durch seinen sehr guten Tragekomfort und schont die intakte Umgebungshaut. Sein Komfort und seine Funktionalität führen zu signifikant besseren Rückmeldungen als bei der konventionellen Versorgung. Und damit zu hoher Akzeptanz beim Anwender.

Die Vorteile auf einen Blick

- bis zu 90 % Zeitersparnis bei der Verbandanlage³
- dichtet Wunden an Extremitäten einfach und zuverlässig ab
- hoher Tragekomfort für den Patienten

90 %

Bis zu 90 % Zeitersparnis bei der Verbandanlage.³

92 %

der Anwender würden EasyDress sofort wieder verwenden.³


EasyDress Fixateur Externe – die 4. Dimension in der EasyDress Range.

EasyDress Fixateur Externe ist 1,20 Meter lang und verfügt über einen Umfang von 1,50 Metern. Diese Dimension ermöglicht den universellen Einsatz an Extremitäten, versorgt mit verschiedenen Fixateur Externe Modellen.

EasyDress ist in den Dimensionen S, M & L sowie als Fixateur Externe erhältlich.

Universell einsetzbar


Mit verschiedenen Fixateur-Externe-Modellen verwendbar.

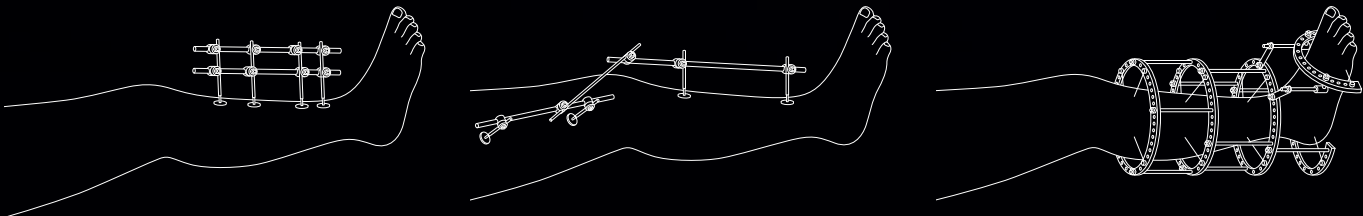

Suprasorb®

CNP EasyDress & EasyDress Fixateur Externe


Ihr Nutzen auf einen Blick.

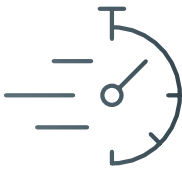

EasyDress lässt sich einfach anbringen, schnell fixieren und dichtet zuverlässig ab. Damit erweist sich EasyDress als **zeit- und kosteneffizient**.



EasyDress ist luftdicht und keimdicht, aber **hochwasserdampfdurchlässig** (mind. 2.000 ml pro m² in 24 Stunden) und klebefrei. Dadurch schont der Sekundärverband die intakte Umgebungshaut des Patienten.

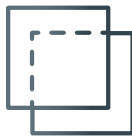

Die **transparente Spezialfolie** des EasyDress ermöglicht das Beobachten des Primärverbandes sowie der Umgebungshaut.



EasyDress ist in drei Dimensionen erhältlich und auf jede benötigte Länge **zuschneidbar**. EasyDress Fixateur Externe ist die 4. Dimension der EasyDress Range.



Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit des **EasyDress Fixateur Externe** unterstützt das Feuchtigkeitsmanagement unter dem Verband.



Das Material des **EasyDress Fixateur Externe** bietet einen vollflächigen Schutz gegen das Eindringen von Keimen.

Fallbeispiel

EasyDress und Drainagefolie

Unterdrucktherapie bei infiziertem Katzenbiss⁶

69-jähriger Mann; stationäre Aufnahme mit abszedierender Unterschenkel- und Sehnenscheidenphlegmone mit Teilnekrose der Peroneus-longus-Sehne nach Katzenbiss; drei Wochen zuvor unter ambulanter Antibiose mit Ciprofloxacin.



Das Ergebnis:

Die Drainagefolie – ursprünglich gedacht für die abdominelle Anwendung – eignet sich hervorragend zum Schutz von sensiblen Strukturen wie in diesem Fall der Peroneussehne, fördert die Granulation bei gleichmäßigem Flüssigkeitsmanagement und gewährleistet einen atraumatischen Verbandwechsel.

Erfahren Sie hier mehr Details zu dem Fallbeispiel.



Suprasorb®

CNP EasyDress

Einfach, schnell und hautschonend.

1 Überziehen

EasyDress in der passenden Größe wählen, falls nötig zuschneiden und über die zu behandelnde Extremität ziehen. Die Wunde haben Sie zuvor mit einem Wundfüller Ihrer Wahl, wie antimikrobiellem Verbandmull oder Wundschaum, versorgt.

Am offenen Ende straffen und in **Z-Faltung** an der Extremität anlegen. Jetzt wird EasyDress mit den beiliegenden **Fixierstreifen** zirkulär befestigt. Der Bereich ist nun luftdicht.

2 Fixieren

Mit **EasyDress** als Sekundärverband lassen sich auch **großflächige Unterschenkelulzera** einfach, schnell und hautschonend versorgen.



3 Therapie starten


Das Drainagepad auf das – in den EasyDress – geschnittene Loch über der Wundlokalisierung setzen und mit dem Gerät verbinden. **Fertig! Die Unterdrucktherapie startet.**

Universell für Arm und Bein

EasyDress passt sich an **unterschiedliche Anatomien** oberer und unterer Extremitäten an.



EasyDress ermöglicht die Versorgung schwieriger Wundlokalisationen.

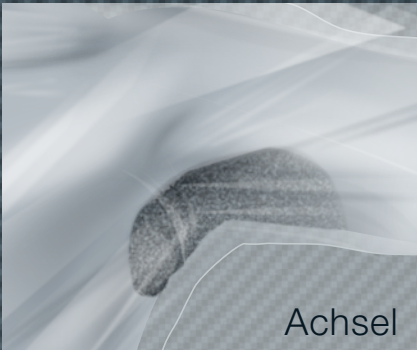

Suprasorb® CNP Kits – die Maßkonfektion für die Klinik.

Ob im OP oder auf der Station – mit dem Suprasorb CNP Kit und Kit PLUS haben Sie die benötigten Komponenten zur effektiven Unterdrucktherapie steril und fertig gepackt zur Hand. Keine Suche nach Einzelprodukten, keine kleinteilige Lagerhaltung und keine überflüssigen Einwegteile. Zudem werden die Prozesse der Dokumentation, Bestellung und Verwaltung vereinfacht.

- begünstigt zeitsparende Arbeitsprozesse
- erlaubt exakte Bedarfsplanung
- ermöglicht effizientes Handling
- bietet mehr Sicherheit
- gewährt hohe Kostentransparenz

Die Symbolik zu Inhalten und Verpackungsgröße unterstützt Sie beim schnellen Griff zum richtigen CNP Kit.



Im CNP Kit Konzept bilden die Kernprodukte „Wund-schaum“ und „Verbandmull“ jeweils die Basis für CNP Kits in den Größen S, M und L.

Die Kit PLUS Lösungen sind ergänzt durch sterile Einweginstrumente wie Schere und Pinzette.

Das „Kit PLUS Abdominal“ ist ein Spezial-Kit für die Behandlung des offenen Abdomens mit integrierter High-Tech-Lösung Suprasorb CNP Drainagefolie und rundet die attraktive CNP-Kits-Range ab.

Kit PLUS Wundschaum



Kit PLUS Abdominal



Suprasorb® CNP – noch mehr Möglichkeiten in der Unterdrucktherapie:

Suprasorb® CNP endo

Das Gesamtsystem für die intraluminale und intrakavitäre Unterdrucktherapie im oberen und unteren Gastrointestinaltrakt.

Ihre Vorteile:

- ⊕ integrierte Ernährungssonde im Kit Oral N für zeitgleiche Ernährung
- ⊕ eigens für unser Gesamtsystem zugelassene elektronische Therapieeinheit
- ⊕ kontrolliertes Platzieren unter endoskopischer Sicht am Ort der Therapie



Erfahren Sie hier mehr über Suprasorb CNP endo.



VivereX®

Unser handliches Single Use System für die Unterdrucktherapie.

Ihre Vorteile:

- ⊕ **Zuverlässig:** Exsudat wird aufgenommen, Feuchtigkeit kann verdunsten.
- ⊕ **Einfach:** Gebrauchsfertigen Wundverband anlegen. Knopf drücken. Therapie starten.
- ⊕ **Kosteneffizient:** Gebrauchs-fertige Wundverbände ermög-lichen lange Wechselintervalle und schnellere Verbandwechsel.



Erfahren Sie hier mehr über VivereX.



Suprasorb® CNP Bestellübersicht

Suprasorb® CNP P3 Therapieeinheit

	REF	SC/TC
Suprasorb CNP P3 – Verkaufsgerät		
System für die Controlled Negative Pressure Therapie, mit Betthalter, Tasche, Behälter 250 ml, Behälter 1.000 ml, im Transportkoffer	31 780	1/1
Suprasorb CNP P3 – Verleihgerät		
System für die Controlled Negative Pressure Therapie, mit Betthalter, Tasche, Behälter 250 ml, Behälter 1.000 ml, im Transportkoffer	34 780	1/1

Suprasorb® CNP P3 Komponenten einzeln steril verpackt

	REF	SC/TC
Suprasorb CNP Exsudatbeutel 250ml	32 900	4/24
Suprasorb CNP Exsudatbeutel 1.000ml	32 901	4/24
Suprasorb CNP Drainagepad	33 600	10/60
Suprasorb CNP Y-Konnektor	33 200	10/80
Suprasorb CNP Kit Konnektor stand alone	140 240	7/56

Suprasorb® CNP P3 Therapieeinheit Zubehör

	REF	SC/TC
Suprasorb CNP Behälter 250ml	32 910	1/6
Suprasorb CNP Behälter 1.000ml	32 911	1/10
Suprasorb CNP Betthalter	32 885	1/1
Suprasorb CNP Universalhalter	32 886	1/1
Suprasorb CNP Tasche für den mobilen Einsatz	32 888	5/30
Netzteil	32 988	1/36

PVA-Schaum (Polyvinylalkohol) einzeln steril verpackt

Größe	Abmessungen (mm)	REF	SC/TC
S/weiß	75x100x9	139 600	10/40
M/weiß	150x100x9	139 601	10/60

Suprasorb® CNP Wundschäume einzeln steril verpackt

Größe/Sortiment	Abmessungen (mm)	REF	SC/TC
M dünn, anthrazit	100x150x10	31 800	10/40
M anthrazit	100x150x30	31 801	10/20
L anthrazit	250x150x30	31 802	10/20
XL anthrazit	250x300x30	31 803	10/20
Abdomen anthrazit (2 Stück)	380x250x15	31 804	10 (5x2)/ 20 (2x5x2)

Kerlix AMD Superschwämme

	Abmessungen (cm)	REF	SC/TC
5 x 2 Stück	15,2 x 17,1	420 042	10/80

Antimikrobieller Verbandmull gerollt steril

Abmessungen (cm)	REF	SC/TC
11,4x370	25 283	5/40

Suprasorb® CNP Tiefendrainage einzeln steril verpackt


Abmessungen (cm)	REF	SC/TC
90 cm Länge, davon 30 cm perforiert, 24 CH	33 700	10/60

Suprasorb® CNP Drainagefolie einzeln steril verpackt

Abmessungen (cm)	REF	SC/TC
Abdominal, 77x60	39 400	5/40
20x25	39 395	12/144

Suprasorb® CNP EasyDress einzeln steril verpackt

Suprasorb CNP EasyDress		Größe (cm)			Fixierstreifen, 10x12cm	REF	SC/TC	
		1	2	3				
Innovativer Unterdruckverband für Extremitäten		S	50	30	70	5 Stk.	34 901	5/40
		M	65	40	85	7 Stk.	34 902	5/40
		L	80	50	95	8 Stk.	34 903	5/40

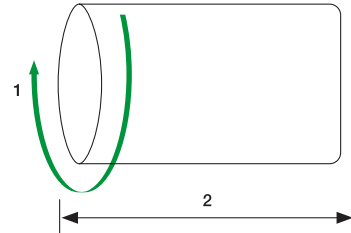Suprasorb CNP EasyDress Fixateur Externe	Größe (cm)			Fixierstreifen, 10x25cm	REF	SC/TC
	1	2				
	One Size	150	120	6 Stk.	34 905	5/30

Suprasorb® CNP Klebefolie

Größe (cm)	REF	SC/TC
10 x 25	420 001	10/140
20 x 30	420 002	10/180

Folienverband

	Klebefläche (cm)	REF	SC/TC
Gerollt, steril verpackt, im Kit mit Lineal	15x200	170 013	15/45

Lomatuell® Pro Gelbildendes Kontaktnetz einzeln steril verpackt

Abmessungen (cm)	REF	SC/TC
5 x 5	30 870	10/360
10 x 10	30 871	10/120
10 x 20	30 872	10/120
10 x 30	30 873	10/80
10 x 10	30 874	50/450

Suprasorb® CNP Bestellübersicht

Suprasorb® CNP Kits – Wundschaum

Größe	Inhalt	REF	SC/TC
S	1 x Raucodrape Einschlagtuch, 68 x 70 cm 3 x Folienverband, 10 x 25 cm 1 x Suprasorb CNP Drainagepad 1 x Suprasorb CNP Wundschaum M, dünn, 100 x 150 x 10 mm	170 000	6/30
M	1 x Raucodrape Einschlagtuch, 68 x 70 cm 3 x Folienverband, 10 x 25 cm 1 x Suprasorb CNP Drainagepad 1 x Suprasorb CNP Wundschaum M, 100 x 150 x 30 mm	170 001	5/25
L	1 x Raucodrape Einschlagtuch, 68 x 70 cm 5 x Folienverband, 10 x 25 cm 1 x Suprasorb CNP Drainagepad 1 x Suprasorb CNP Wundschaum L, 250 x 150 x 30 mm	170 002	5/15

Suprasorb® CNP Kits PLUS – Wundschaum

Größe	Inhalt	REF	SC/TC
S	1 x Raucodrape OP Tischabdeckung, 120 x 140 cm 1 x Pinzette anatomisch, 13 cm 1 x Chirurgische Schere spitz/stumpf gerade, 14,5 cm 5 x Gazin Mullkompressen RK, 8-fach, 10 x 10 cm 1 x Hautmarkierungsstift mit Lineal 1 x Tablett, 24,5 x 14 x 5 cm 3 x Folienverband, 10 x 25 cm 1 x Suprasorb CNP Drainagepad 1 x Suprasorb CNP Wundschaum M, dünn, 100 x 150 x 10 mm	170 007	5/15
M	1 x Raucodrape OP Tischabdeckung, 120 x 140 cm 1 x Pinzette anatomisch, 13 cm 1 x Chirurgische Schere spitz/stumpf gerade, 14,5 cm 5 x Gazin Mullkompressen RK, 8-fach, 10 x 10 cm 1 x Hautmarkierungsstift mit Lineal 1 x Tablett, 24,5 x 14 x 5 cm 3 x Folienverband, 10 x 25 cm 1 x Suprasorb CNP Drainagepad 1 x Suprasorb CNP Wundschaum M, 100 x 150 x 30 mm	170 008	5/15
L	1 x Raucodrape OP Tischabdeckung, 120 x 140 cm 1 x Pinzette anatomisch, 13 cm 1 x Chirurgische Schere spitz/stumpf gerade, 14,5 cm 5 x Gazin Mullkompressen RK, 8-fach, 10 x 10 cm 1 x Hautmarkierungsstift mit Lineal 1 x Tablett, 24,5 x 14 x 5 cm 5 x Folienverband, 10 x 25 cm 1 x Suprasorb CNP Drainagepad 1 x Suprasorb CNP Wundschaum L, 250 x 150 x 30 mm	170 009	5/15

Suprasorb® CNP Kits – Antimikrobieller Verbandmull

Größe	Inhalt	REF	SC/TC
S	1 x Raucodrape Einschlagtuch, 68 x 70 cm 3 x Folienverband, 10 x 25 cm 1 x Suprasorb CNP Drainagepad 2 x Antimikrobieller Verbandmull, 15 x 17 cm	170 004	6/30
M	1 x Raucodrape Einschlagtuch, 68 x 70 cm 4 x Folienverband, 10 x 25 cm 1 x Suprasorb CNP Drainagepad 5 x Antimikrobieller Verbandmull, 15 x 17 cm	170 005	5/25
L	1 x Raucodrape Einschlagtuch, 68 x 70 cm 1 x Folienverband gerollt, 15 x 200 cm 1 x Suprasorb CNP Drainagepad 1 x Antimikrobieller Verbandmull gerollt, 11,4 x 370 cm	170 006	5/15

Suprasorb® CNP Kits PLUS – Antimikrobieller Verbandmull

Größe	Inhalt	REF	SC/TC
S	1 x Raucodrape OP Tischabdeckung, 120 x 140 cm 1 x Pinzette anatomisch, 13 cm 1 x Chirurgische Schere spitz/stumpf gerade, 14,5 cm 5 x Gazin Mullkompressen RK, 8-fach, 10 x 10 cm 1 x Hautmarkierungsstift mit Lineal 1 x Tablett, 24,5 x 14 x 5 cm 3 x Folienverband, 10 x 25 cm 1 x Suprasorb CNP Drainagepad 2 x Antimikrobieller Verbandmull, 15 x 17 cm	170 010	5/15
M	1 x Raucodrape OP Tischabdeckung, 120 x 140 cm 1 x Pinzette anatomisch, 13 cm 1 x Chirurgische Schere spitz/stumpf gerade, 14,5 cm 5 x Gazin Mullkompressen RK, 8-fach, 10 x 10 cm 1 x Hautmarkierungsstift mit Lineal 1 x Tablett, 24,5 x 14 x 5 cm 4 x Folienverband, 10 x 25 cm 1 x Suprasorb CNP Drainagepad 5 x Antimikrobieller Verbandmull, 15 x 17 cm	170 011	5/15
L	1 x Raucodrape OP Tischabdeckung, 120 x 140 cm 1 x Pinzette anatomisch, 13 cm 1 x Chirurgische Schere spitz/stumpf gerade, 14,5 cm 5 x Gazin Mullkompressen RK, 8-fach, 10 x 10 cm 1 x Hautmarkierungsstift mit Lineal 1 x Tablett, 24,5 x 14 x 5 cm 1 x Folienverband gerollt, 15 x 200 cm 1 x Suprasorb CNP Drainagepad 1 x Antimikrobieller Verbandmull gerollt, 11,4 x 370 cm	170 012	5/15

Suprasorb® CNP Kit PLUS – Abdominal

Inhalt	REF	SC/TC
1 x Raucodrape Einschlagtuch, 80 x 100 cm 1 x Inzisionsfolie, 40 x 35 cm 1 x Suprasorb CNP Drainagefolie, 77 x 60 cm 1 x Suprasorb CNP Drainagepad 2 x Suprasorb CNP Wundschaum Abdomen, 380 x 250 x 15 mm	417 003	5/15

Abdomen-Spezialprodukte siehe auch Seite 23 oben



People.Health.Care.

Unsere Schulung, Ihr Therapieerfolg.

Das Suprasorb CNP P3 Therapiesystem ist einfach im Handling. Unsere CNP Spezialisten machen Sie und Ihr Team mit dem Umgang vertraut, so kommt Ihr neues Therapiesystem schnell zum Einsatz.

Gerne betreuen wir Sie im Vorfeld und in der Praxis. Fragen Sie uns. Jederzeit.

Quellen:

- 1) 89% der Fachanwender stimmen dieser Aussage zu.
- 2) Basierend auf In-vitro-Untersuchungen.
- 3) M. Duft, D. Ostapowicz, S. de Lange, K. Griebhammer, M. Abel: Audit on the usability, user and patient satisfaction of tubular bandage, Multi-center international post-marketing clinical study under real conditions.
- 4) Dr. med. Gisbert Röttger „Suprasorb CNP P3 System mit Suprasorb CNP Tiefendrainage – Einsatz nach Sepsis bei großflächigem Dekubitus IV. Grades sacral und gluteal“, clinical case description, data on file.
- 5) T. Auer, A. Wels, „Suprasorb CNP Drainagefolie – Erfolgreiche Behandlung einer Dünndarmfistel mittels Suprasorb CNP Drainagefolie unter kontinuierlichem Sog“, clinical case description, data on file.
- 6) D. Hoffrichter, „Suprasorb CNP EasyDress und Suprasorb CNP Drainagefolie – Unterdrucktherapie bei infiziertem Katzenbiss“, clinical case description, data on file.

Suprasorb®

Herausgeber

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Irlicher Straße 55, D-56567 Neuwied
Lohmann & Rauscher GmbH, Kirchengasse 17, A-2525 Schönaun an der Triesting

Kontaktadresse

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Westerwaldstraße 4, D-56579 Rengsdorf

www.Lohmann-Rauscher.com

9510913 0426 de