



People.Health.Care.

Suprasorb®

CNP EasyDress

3D-Innovation für Unterdrucktherapie an Extremitäten.

Patentiert. Mit Innovations-
preis ausgezeichnet.



EasyDress

Suprasorb®

Controlled
Negative
Pressure

Suprasorb®

CNP EasyDress

Unser Sekundärverband für Ihre Therapie.

Überziehen – fixieren – Therapie starten. So einfach ist EasyDress. Dank 3D-Geometrie und flexiblem Spezialmaterial ist der Sekundärverband für Ihre Unterdrucktherapie **deutlich schneller dicht als konventionelle Abklebmethoden.**

EasyDress lässt sich einfach ohne Hilfe anbringen. Er ist in unterschiedlichen Größen erhältlich und auf die benötigte Länge zuschneidbar – dadurch gewährleistet er die sehr gute Anpassung an unterschiedliche Anatomien oberer und unterer Extremitäten. Aber auch:

Die Versorgung selbst schwieriger Wundlokalisationen.



Signifikant bessere Rückmeldungen.

EasyDress besticht durch seinen sehr guten Tragekomfort und schont die intakte Umgebungshaut. Sein Komfort und seine Funktionalität führen zu signifikant besseren Rückmeldungen als bei der konventionellen Versorgung. Und damit zu hoher Akzeptanz beim Anwender.

Suprasorb®

CNP EasyDress

Einfach, schnell und hautschonend.


Mit **EasyDress** als Sekundärverband lassen sich auch **großflächige Unterschenkelulzera** einfach, schnell und hautschonend versorgen.

1 Überziehen

EasyDress in der passenden Größe wählen, falls nötig zuschneiden und über die zu behandelnde Extremität ziehen. Die Wunde haben Sie zuvor mit einem Wundfüller Ihrer Wahl, wie antimikrobiellem Verbandmull oder Wundschaum, versorgt.

Am offenen Ende straffen und in **Z-Faltung** an der Extremität anlegen. Jetzt wird EasyDress mit den beiliegenden **Fixierstreifen** zirkulär befestigt. Der Bereich ist nun luftdicht.

2 Fixieren

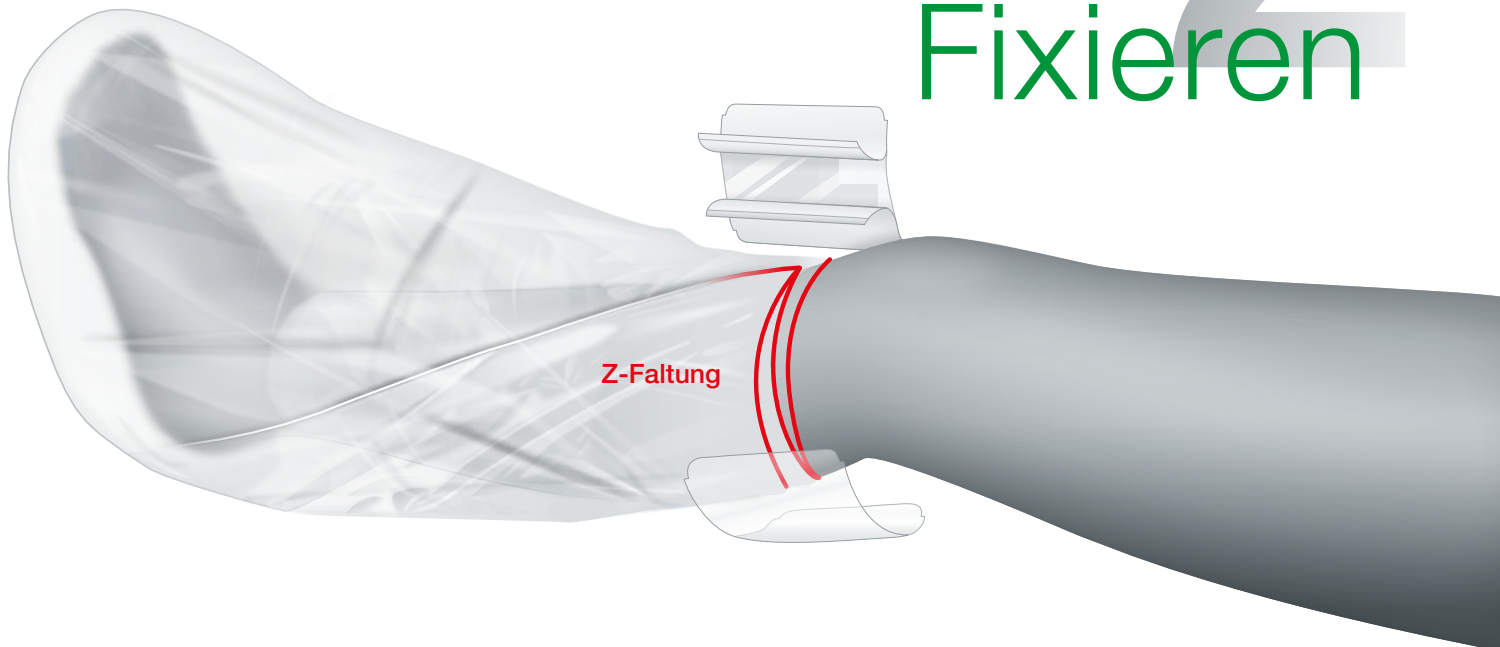




Therapie starten

3

Das Drainagepad auf das – in den EasyDress – geschnittene Loch über der Wundlokalisierung setzen und mit dem Gerät verbinden. **Fertig! Die Unterdrucktherapie startet.**


Universell
für Arm und Bein

EasyDress passt sich an **unterschiedliche Anatomien** oberer und unterer Extremitäten an.

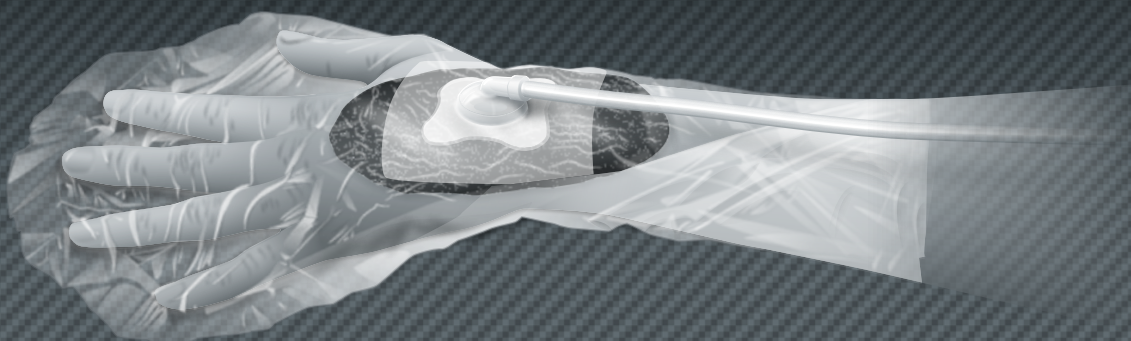

CNP EasyDress

Ihr Nutzen auf einen Blick.

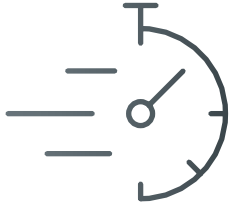

EasyDress lässt sich einfach anbringen, schnell fixieren und dichtet zuverlässig ab. Damit erweist sich EasyDress als **zeit- und kosteneffizient**.



EasyDress ist luftdicht und keimdicht, aber **hochwasserdampfdurchlässig** (mind. 2.000 ml pro m² in 24 Stunden) und klebefrei. Dadurch schont der Sekundärverband die intakte Umgebungshaut des Patienten.



Die **transparente Spezialfolie** des EasyDress ermöglicht das Beobachten des Primärverbandes sowie der Umgebungshaut.



EasyDress ist in drei Dimensionen erhältlich und auf jede benötigte Länge **zuschneidbar**. EasyDress Fixateur Externe ist die 4. Dimension der EasyDress Range.



90 %

Bis zu 90 % Zeitersparnis bei der Verbandanlage.¹




92 %

92 % der Anwender würden EasyDress sofort wieder verwenden.¹



People.Health.Care.



Suprasorb® CNP EasyDress

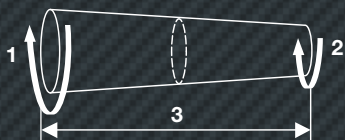REF	Größe Size	Schlauchverband Tubular bandage			Fixierstreifen Retention strips
					
		1	2	3	10 cm x 12 cm
34901	S	50 cm	30 cm	70 cm	5 Stk · pcs
34902	M	65 cm	40 cm	85 cm	7 Stk · pcs
34903	L	80 cm	50 cm	95 cm	8 Stk · pcs

Quelle:

1) M. Duft, D. Ostapowicz, S. de Lange, K. Griebhammer, M. Abel: Audit on the usability, user and patient satisfaction of tubular bandage, Multi-center international post-marketing clinical study under real conditions.

Die 4. Dimension der EasyDress Range: Suprasorb® CNP EasyDress Fixateur Externe

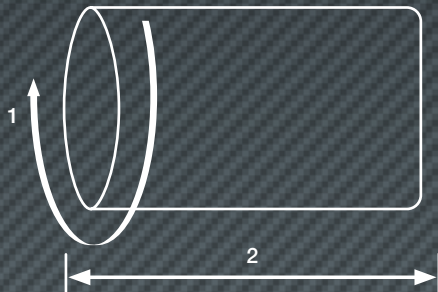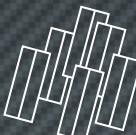REF	Größe Size	Schlauchverband Tubular bandage		Fixierstreifen Retention strips
				
		1	2	10 cm x 25 cm
34905	One Size	150 cm	120 cm	6 Stk · pcs



Suprasorb®