



People.Health.Care.

Suprasorb®  
**CNP endo**

Endoskopische  
Unterdrucktherapie im  
oberen und unteren  
Gastrointestinaltrakt.



**Das einzige Gesamtsystem**  
mit kontrolliertem Unterdruck und  
integrierter Ernährungssonde.



endo

# CNP endo – Gesamtsystem für die endoskopische Unterdrucktherapie


Eigens für die endoskopische Unterdrucktherapie entwickelt. L&R bietet Ihnen ein Gesamtsystem: eine Therapieeinheit mit abgestimmter Software und vier Komponenten-Kits für die intraluminale und intrakavitäre Unterdrucktherapie im oberen und unteren Gastrointestinaltrakt.

Die Suprasorb CNP endo Kits sind therapie- und anwendergerecht konzipiert. Sie beinhalten aufeinander abgestimmte Komponenten, die Sie für eine kontrollierte endoskopische Unterdrucktherapie benötigen.

## Therapieeinheit

Steuert den kontrollierten Unterdruck der Therapie.

## Schaumdrainage ohne Ernährungssonde

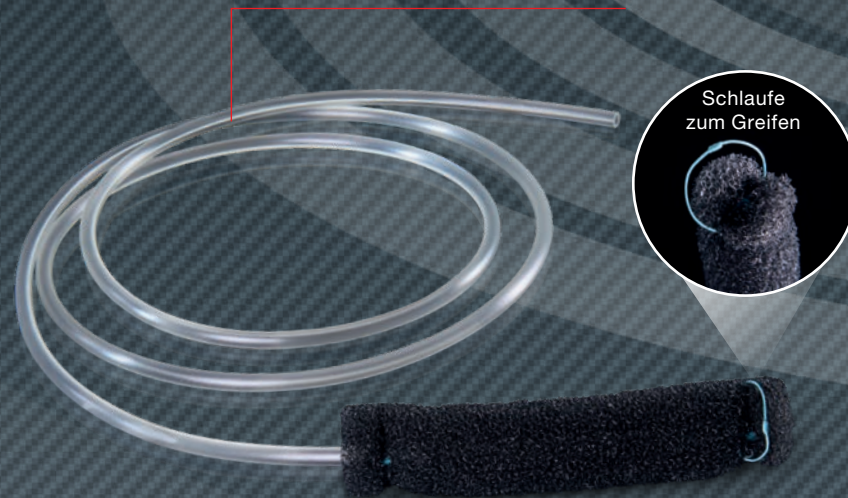

Einfaches Konnektieren mit der elektronischen Therapieeinheit.

## Schaumdrainage mit Ernährungssonde



### Ihre Vorteile:

- integrierte Ernährungssonde im Kit Oral N für zeitgleiche Ernährung
- eigens für unser Gesamtsystem zugelassene elektronische Therapieeinheit
- entwickelt mit Anwendern für Anwender

### Kit Rectal



### Kit Oral



### Kit Oral N



# CNP endo

Kontrolliertes Platzieren am Ort der Therapie.

Das CNP endo Platzierungssystem bringt die – an der Schlaufe gegriffene – Schaumdrainage unter Sicht kontrolliert an den Ort der Therapie.

## 1 Einfaches Greifen durch Schlaufe an distalem Ende



Im Overtube liegen die an der Schlaufe gegriffene Schaumdrainage und das Endoskop hintereinander.



Overtube mit Halteschleife für geschütztes Einführen.


## 2 Geschütztes Einführen mittels Overtube

## 3 Kontrolliertes Platzieren unter endoskopischer Sicht

Nach der Passage durch den Overtube werden Schaumdrainage und Endoskop parallel geführt.



Intraluminale Unterdrucktherapie des Ösophagus mit integrierter Ernährungssonde.

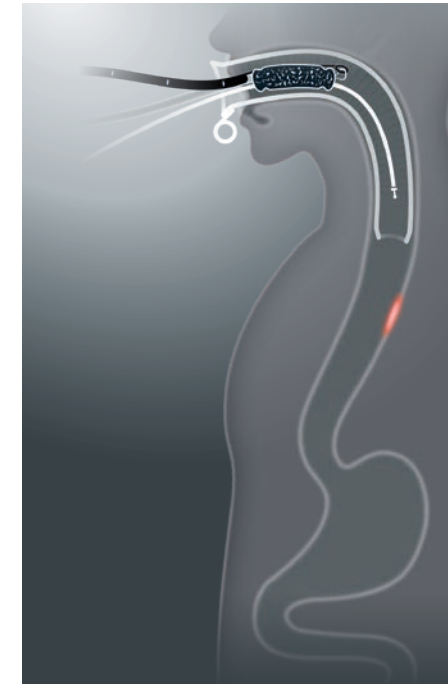

### Geschütztes Einführen

von Schaumdrainage mit integrierter Ernährungssonde und Endoskop mittels Overtube.



### Kontrolliertes Platzieren unter endoskopischer Sicht


von Schaumdrainage und integrierter Ernährungssonde.



### Starten der CNP endo Therapie

Unterdruck am Defekt bei simultaner Ernährung.

Intrakavitäre endoskopische Unterdrucktherapie im Ösophagus.

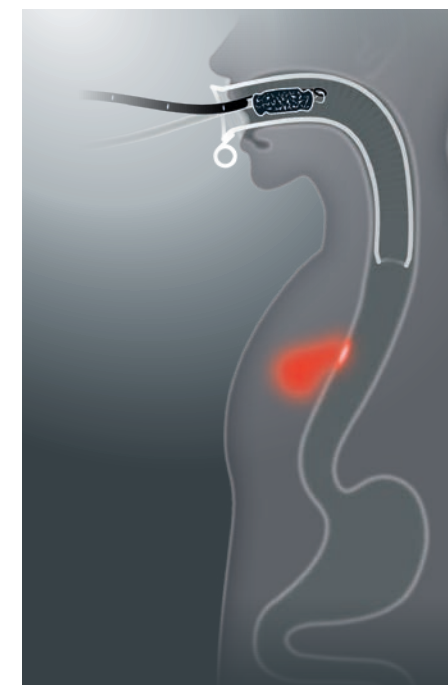


### Geschütztes Einführen

von Schaumdrainage und Endoskop mittels Overtube.



### Kontrolliertes Platzieren unter endoskopischer Sicht

durch den Wanddefekt in der extraluminale Wundhöhle.

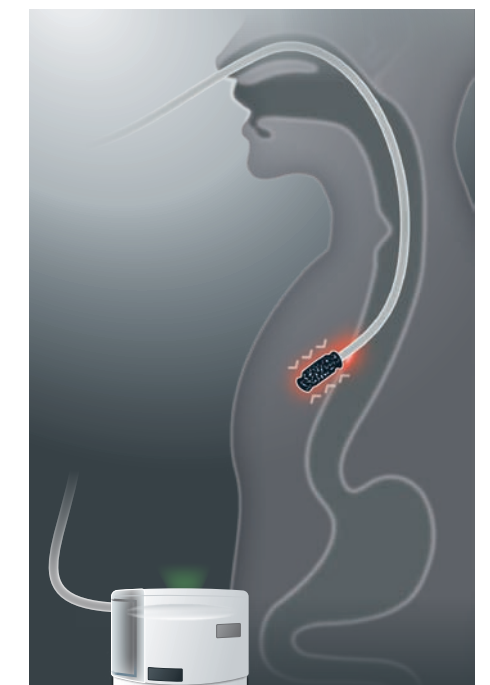

### Starten der CNP endo Therapie

Aufbau des Unterdrucks in der Wundhöhle.

Suprasorb®

# CNP endo Kit Oral N

Endoskopische Unterdrucktherapie des Ösophagus mit simultaner enteraler Ernährung.

Das Suprasorb CNP endo Kit Oral N dient – in Kombination mit der CNP endo Therapieeinheit – der intraluminalen Unterdrucktherapie des Ösophagus.

Einzigartig ist das Kit Oral N durch seine integrierte Ernährungssonde. Sie ermöglicht die enterale Ernährung des Patienten zeitgleich mit der CNP endo Therapie.

Die integrierte Ernährungssonde verläuft innerhalb der langen, schlanken Schaumdrainage. Dies stellt die gleichmäßige Verteilung des Unterdrucks über die gesamte Oberfläche der Schaumdrainage sicher.\*

Die Länge der integrierten Ernährungssonde kann individuell adaptiert werden. Sie lässt sich unkompliziert und schnell in Magen oder Dünndarm platzieren.



## Kit Oral N Intraluminale Behandlung

- Schaumdrainage mit integrierter, längenadaptierbarer Ernährungssonde
- Overtube
- Nasalschlauch
- Fixierpflaster
- Schlauchklemme



\*basierend auf in-vitro Testungen

Suprasorb®

# CNP endo Kit Oral

Endoskopische Unterdrucktherapie im Ösophagus.

Das Suprasorb CNP endo Kit Oral enthält keine Ernährungssonde und eignet sich für die intraluminale und intrakavitäre Therapie.

Die Schaumdrainage des Kits Oral ist auf die benötigte Länge kürzbar. So lässt sie sich – im Rahmen einer intrakavitären Anwendung – an die Wundhöhle anpassen.

Anwendungs- und bedarfsgerechte Komponenten zeichnen beide Kits aus, auch Nasalschlauch und Fixierpflaster sind gleich zur Hand.

## Kit Oral Intrakavitäre Behandlung

- Schaumdrainage
- Overtube
- Nasalschlauch
- Fixierpflaster
- Schlauchklemme



# CNP endo Kit Rectal

## Endoskopische Unterdrucktherapie des Rectums.

Das Suprasorb CNP endo Kit Rectal dient – in Kombination mit der CNP endo Therapieeinheit – der intraluminalen und intrakavitären Unterdrucktherapie des Rectums.

Form und Material des im Kit enthaltenen Proktoskops eignen sich sehr gut für das Einführen der Schaumdrainage in das Rectum.

Anschließend wird die Schaumdrainage unter endoskopischer Sicht am Defekt oder in der Wundhöhle positioniert.


Das Suprasorb CNP endo Kit AddOn beinhaltet ergänzend dazu eine weitere Schaumdrainage sowie einen Y-Konnektor. Es ermöglicht die Versorgung von größeren Wundhöhlen, wenn der Einsatz von mehreren Schaumdrainagen indiziert ist.

### Kit Rectal

- Schaumdrainage
- Proktoskop
- Fixierpflaster
- Schlauchklemme




### Anwendung des Kits Rectal, intrakavitär.

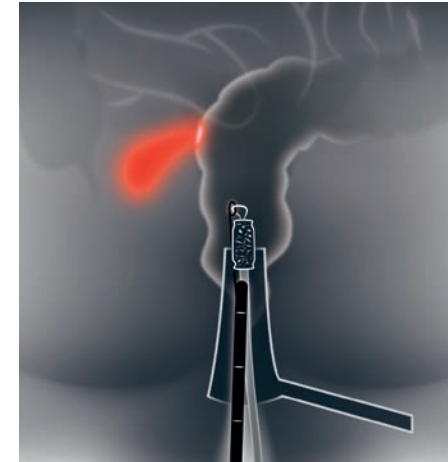

#### Geschütztes Einführen

von Schaumdrainage und Endoskop mittels Proktoskop.

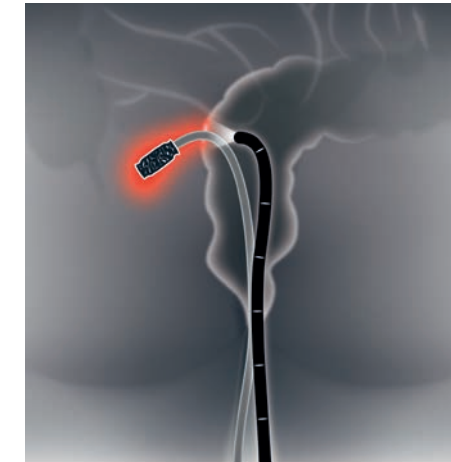

#### Kontrolliertes Platzieren unter endoskopischer Sicht


Platzieren der Schaumdrainage in der Wundhöhle.



#### Starten der CNP endo Therapie


Aufbau des Unterdrucks in der Wundhöhle.

### Anwendung des Kits Rectal, intraluminal.

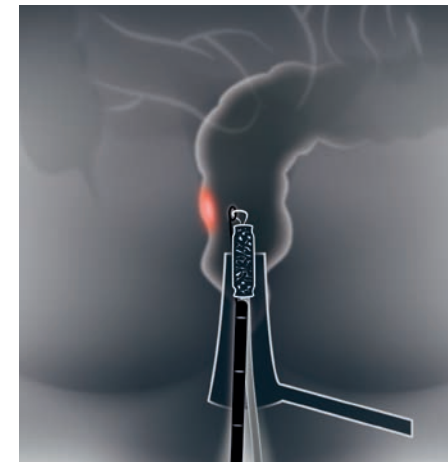

#### Geschütztes Einführen

von Schaumdrainage und Endoskop mittels Proktoskop.

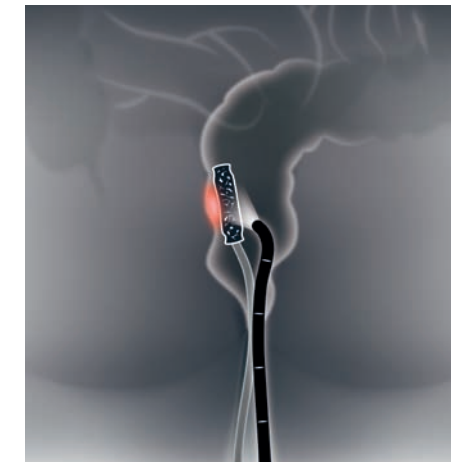

#### Kontrolliertes Platzieren unter endoskopischer Sicht

Platzieren der Schaumdrainage am Defekt.



#### Starten der CNP endo Therapie

Aufbau des Unterdrucks am Defekt.

### Kit AddOn

- Schaumdrainage
- Fixierpflaster
- Y-Konnektor



Suprasorb®

# CNP endo Bestellübersicht

Sie erhalten eine auf das CNP endo System abgestimmte Therapieeinheit sowie maßgeschneiderte Kits für Ihre CNP endo Therapie im oberen und unteren Gastrointestinaltrakt.

## Suprasorb® CNP endo Kit Oral N

| Inhalt                                                                                                        | REF    | SC/TC |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1 Schaumdrainage mit Ernährungssonde<br>1 Overtube<br>1 Nasalschlauch<br>1 Fixierpflaster<br>1 Schlauchklemme | 34 200 | 5/20  |



## Suprasorb® CNP endo Kit Oral

| Inhalt                                                                                    | REF    | SC/TC |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1 Schaumdrainage<br>1 Overtube<br>1 Nasalschlauch<br>1 Fixierpflaster<br>1 Schlauchklemme | 34 199 | 5/20  |



|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| <b>Maße:</b>                                           |        |
| ■ Länge Schaum:                                        | 10 cm  |
| ■ Durchmesser Schaum:                                  | 1,9 cm |
| ■ Länge Drainageschlauch:                              | 120 cm |
| ■ Länge Ernährungssonde:<br>(Einföhrlänge adaptierbar) | 125 cm |
| ■ Länge Overtube:<br>(ohne Haltegriff)                 | 28 cm  |
| ■ Durchmesser Overtube:                                | 2 cm   |

## Suprasorb® CNP endo Kit Rectal

| Inhalt                                                                   | REF    | SC/TC |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1 Schaumdrainage<br>1 Proktoskop<br>1 Fixierpflaster<br>1 Schlauchklemme | 34 201 | 5/20  |



## Suprasorb® CNP endo Kit AddOn

| Inhalt                                                | REF     | SC/TC |
|-------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1 Schaumdrainage<br>1 Fixierpflaster<br>1 Y-Konnektor | 106 500 | 5/20  |



## Suprasorb® CNP endo Therapieeinheit & Zubehör

| Produkt                 | REF     | SC/TC |
|-------------------------|---------|-------|
| Therapieeinheit (Kauf)  | 146 998 | 1     |
| Therapieeinheit (Miete) | 146 999 | 1     |
| Tasche                  | 146 142 | 5/30  |
| Exsudatbehälter         | 39 935  | 1/5   |
| Netzteil                | 159 610 | 1     |





People.Health.Care.



endo

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf  
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien  
Lohmann & Rauscher AG · Oberstrasse 222 · CH-9014 St. Gallen

[www.Lohmann-Rauscher.com](http://www.Lohmann-Rauscher.com)

9509936 0823 d