



People.Health.Care.

Fallbericht Rosidal® 1C

Erysipel Untere Extremität: Kompressions- therapie mit neuer 3-in-1 Kurzzugbinde



Dr. Günther Hirschberger
Facharzt für Allgemeinmedizin, Familienmedizin
und Geriatrie, zertifizierter Wundmanager,
Notarzt sowie Diplom für Ernährungsmedizin.



Autor

Seit 1990 ist Dr. Hirschberger als Hausarzt in einer eigenen Praxis tätig. Mit seinem Team gemeinsam führt er eine umfassende, allgemeinmedizinische Praxis.

Täglich versorgen sie 20 bis 30 chronische Wundpatienten in der Ordination, auf Visiten und in 10 Pflegeheimen.



Abstract

Das Testprodukt Rosidal 1C wurde über einen Zeitraum von vier Wochen an einer Testperson angewendet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bandagen einfach und zeitsparend in der Anwendung sind. Der Patient gab ein angenehmes Tragegefühl, einen guten Sitz und eine problemlose Alltagstauglichkeit an.



Patientenvorstellung

Demografische Daten:

75 jähriger Patient, männlich, Pensionist, erlernter Beruf Tischler, bis zur Pensionierung in der Möbeldmontage tätig



Verbandswechsel 1:

Wundgrund: nässend belegt, teils granulierend;
Versorgung: Nugel, hydroaktiver Faserverband, Vliwazell, Rosidal 1C

Fallbericht Rosidal® 1C

Erysipel Untere Extremität: Kompressions- therapie mit neuer 3-in-1 Kurzzugbinde



Anamnese

Grunderkrankungen:

VHFA, Diabetes mellitus, art. Hypertonie, Erysipel Untere Extremität rechts

Entstehung der Wunden:

Der Patient verletzte sich im Urlaub am rechten Unterschenkel. Es entwickelte sich ein Erysipel. Noch am Urlaubsort erhielt der Patient Antibiose iv für 6 Tage. Im Anschluss wurde die Behandlung im Heimatkrankenhaus fortgesetzt. Nach 4-wöchiger Behandlung beim Hausarzt ohne wesentliche Verbesserung, kommt der Patient zur Versorgung in unsere Ordination.

Symptomatik:

Wunden im Schienbein und Wadenbereich, stark belegt, stark nässend, Bein ödematös und gerötet. Patient gibt mäßigen Wundschmerz an.



Therapie

Therapieentscheidung:

WG Silberauflage und Beginn mit einfacher Kompression. Verbandswechsel zwei mal wöchentlich

Therapieziel:

Abklingen von Rötung und Stauung, Verbesserung der Microcirculation, in weiterer Folge Reinigung und Abheilung der ulcera.

Begleitmaßnahmen:

Labor: Eisen-Status abgenommen, aufgrund starken Eisenmangels Ferinject iv erh. sowie Nahrungsergänzungsmittel Pro Wund eingenommen. Täglich ausreichend Bewegung empfohlen.

Effektivität:

Ödeme und Rötung der unteren Extremität sind rasch abgeklungen, Wunden nach Reinigungsphase gut granuliert, im Laufe der nächsten Wochen vollständig abgeheilt.



Verbandswechsel 2:

Wundgrund granulierend, vom Wundrand her epithelisierend;
Versorgung: Nudel, hydroaktiver Faserverband, Schaumverband, Rosidal 1C



Verbandswechsel 3:

Wundgrund granulierend, vom Wundrand her epithelisierend;
Versorgung: Nudel, hydroaktiver Faserverband, Schaumverband, Rosidal 1C





Klinische Untersuchung und Diagnose

Gefäßmessung:

normale Gefäßsteifigkeit, keine PAVK feststellbar

Doppler Sonographie:

alle Fußpulse gut darstellbar

Labor:

BB und CRP, keine Entzündungszeichen systemisch

Diagnose:


Stauungsdermatitis rechte untere Extremität, traumatisches ulcer cruris venosum dext



Fazit

Die Anlage von Rosidal 1C Bandagen ist einfach und zeitsparend. Man erzielt eine sehr gute Kompression mit wenig Materialaufwand. Der Patient gibt einen sehr guten Tragekomfort an.

Der Verband bleibt fest, verrutscht nicht und wird auf der Haut als angenehm empfunden. Er kann gut in Schuhen oder Stiefeln getragen werden ohne zu drücken.

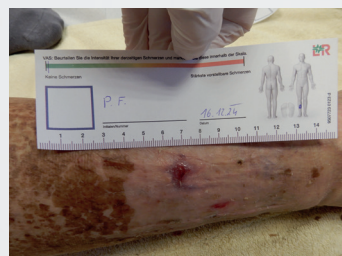


Verbandswechsel 4:

Wundgrund hypergranulierend, am Rand epithelisierend;
Versorgung: Elocon Creme, hydroaktiver Faserverband, Schaumverband, Rosidal 1C



Verbandswechsel 5:

Wundgrund hypergranulierend, am Rand epithelisierend;
Versorgung: Elocon Creme, hydroaktiver Faserverband, Schaumverband, Rosidal 1C

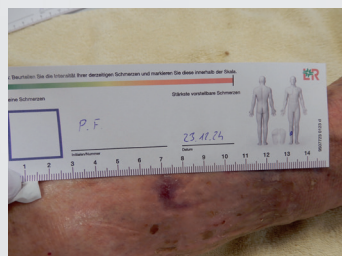

Verbandswechsel 6:

Wunde Schienbein abgeheilt, Wunde Unterschenkel Rückseite epithelisierend; Versorgung: Schaumverband, Rosidal 1C



People.Health.Care.

Rosidal® 1C **NEU**

Kompression neu gedacht,
schnell gemacht.

Die 3-in-1 Kurzzugbinde:

Hautkontaktlage

Polsterschichtlage

Kompressionslage

3-in-1

effektiv

zeitsparend

einfach

www.Lohmann-Rauscher.com



2005535 0325 de